

Manuel d'utilisation

REF Adjustable Footboard/Table
Extension 800-0285

Matelas de rechange

**Adjustable Footboard/Table Extension
Pad 508-1347**

UTILISATION PRÉVUE

Adjustable Footboard/Table Extension se monte horizontalement comme une extension de table. Se monte aussi verticalement comme support de pieds lors de l'utilisation du Trendelenburg inversé. Les utilisateurs prévus de ce dispositif sont les professionnels de la santé dans les hôpitaux et les centres de chirurgie.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Dimensions du dispositif (maximum)

- Longueur : 61 cm +/- 1 cm
- Largeur : 46 cm +/- 1 cm (étendu)
- Profondeur : 25 cm +/- 1 cm (avec matelas)
- Poids du dispositif : 5,8 +/- 0,22 kg
- Une seule personne est nécessaire pour l'installation
- Poignée de verrouillage/déverrouillage

INSTRUCTIONS

Se familiariser avec les caractéristiques du dispositif de positionnement du patient avant de l'utiliser avec un patient. Toujours s'exercer sur un(e) infirmier/-ière, un(e) médecin ou un(e) volontaire approprié(e) avant toute utilisation clinique.

Fixation de Adjustable Footboard/Table Extension à la table chirurgicale



Boutons de verrouillage (1 & 2), poignée du collier de montage (3)

1. Fixer les SpringLoc Clamps (vendues séparément) aux rails latéraux de la table
2. Monter le panneau de pied de lit dans les collier et le verrouiller fermement en tournant les poignées des collier de montage dans le sens des aiguilles d'une montre
3. Pour allonger la taille de la table chirurgicale, monter l'extension horizontalement. Tirer les deux boutons de verrouillage (1 et 2) et abaisser jusqu'à ce que le matelas soit au même niveau que celui de la table chirurgicale.
4. Pour créer un support pour les pieds lors d'une position de Trendelenburg inversée, tirer les deux boutons de verrouillage et soulever l'extension jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place à 90° avec le plateau de la table chirurgicale

Détachement de Adjustable Footboard/Table Extension de la table

1. Tourner les poignées des colliers dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer l'Adjustable Footboard/Table Extension
2. Soulever l'Adjustable Footboard/Table Extension de la table chirurgicale. Retour à l'unité de stockage

PRÉSENTATION DES COMPOSANTS

Adjustable Footboard/Table Extension est utilisée comme une extension de table chirurgicale ou comme support de pied.

Autres produits nécessaires à l'utilisation :

800-0338 SpringLoc Clamp (États-Unis), 2 pièces (vendues séparément)

800-0338-EU SpringLoc Clamp (UE), 2 pièces (vendues séparément)

800-0338-JPN SpringLoc Clamp (JPN), 2 pièces (vendues séparément)

800-0338-SWISS SpringLoc Clamp (SUISSE), 2 pièces (vendues séparément)

Matelas de rechange

508-1347 Adjustable Footboard/Table Extension Pad, 54 cm x 25 cm x 5 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- *Produit non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel*
- *Le dispositif supporte une charge proportionnelle de 227 kg (pour un patient de 193 cm selon un modèle de corps humain à 99 %)*
- *La garantie du produit le couvre contre les défauts de fabrication pendant une période de 2 ans*
- *Si le produit est endommagé pendant l'expédition, appeler le service clientèle au (888) 724-8763 ou au (781) 982-7000 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel. Pour les questions relatives à la garantie des produits, contacter le service clientèle.*
- *Dispositif médical certifié CE selon le MDR (EU) 2017/745*
- *Aucun entretien n'est nécessaire en dehors d'un nettoyage adapté*
- *La durée de vie du dispositif est de 5 ans dans des conditions normales d'utilisation*
- *Stocker le dispositif entre -20°C et 30°C*

MISE AU REBUT

- **Informations générales :** *nettoyer et désinfecter le produit avant la mise au rebut permet d'éviter les infections*
- **Emballage :** *éliminer les matériaux d'emballage avec les déchets ménagers conformément aux exigences nationales*
- *SchureMed reprend les produits utilisés ou obsolètes, ou met le produit au rebut conformément aux exigences nationales*



MISE EN GARDE SUR L'UTILISATION DU PRODUIT ATTENTION !

La charge maximale ne doit pas dépasser la proportion appropriée d'un patient pesant 227 kg. Avec les tables chirurgicales à faible capacité de charge maximale, veiller à ce que les rails d'accessoires ne soient pas surchargés.



ATTENTION !

Une utilisation incorrecte peut entraîner des risques. Suivez scrupuleusement le manuel d'utilisation de votre système de table d'opération.



***ATTENTION !** Ne pas réutiliser le dispositif s'il présente des signes évidents de dommages ou de problèmes fonctionnels. Consulter le fabricant avant de le réutiliser.*

RECOMMANDATION DE NETTOYAGE

Suivre les directives actuelles de l'Association of periOperative Registered Nurses Journal pour connaître la procédure de nettoyage et de désinfection appropriée.



ATTENTION !

Respecter les normes relatives aux agents pathogènes transmissibles par le sang de la Occupational Safety and Health Administration. Utiliser les vêtements de protection recommandés (gants, masque, lunettes de protection) pour nettoyer les accessoires.

AVERTISSEMENT

Lire et suivre scrupuleusement les instructions du fabricant concernant les liquides de nettoyage. NE PAS utiliser de nettoyeurs contenant des produits phénoliques.

- 1. Retirer les principaux contaminants de l'accessoire avec des matériaux jetables. Suivre les procédures appropriées d'élimination des déchets présentant un risque biologique.*
- 2. Appliquer généreusement le liquide de nettoyage sur l'ensemble de l'accessoire et l'essuyer avec un chiffon propre et non pelucheux jusqu'à ce que toute trace d'humidité et de liquide de nettoyage soit éliminée de l'accessoire*
- 3. Laisser l'accessoire sécher*

AVIS AUX UTILISATEURS

Tout incident grave survenu en rapport avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.



Basic UDI-DI : 081001460F0072E9

Langues disponibles pour le manuel d'utilisation en ligne

Pour télécharger et imprimer le manuel d'utilisation, veuillez vous rendre sur <http://www.schuremed.com/schuremed-eifu>.

Glossaire des symboles

Symbole	Titre	Description du symbole
	Fabriquant	Indique le fabriquant du dispositif médical.
	Représentant agréé dans l'Union européenne	Indique le représentant agréé dans l'Union européenne.
	Date limite d'utilisation	Indique la date après laquelle le dispositif médical ne doit plus être utilisé.
	Code du lot	Indique le code de lot du fabriquant afin que le lot ou le lot de fabrication puisse être identifié.
	Numéro de référence ou de l'article	Indique le numéro de référence ou d'article du fabriquant afin que le dispositif médical puisse être identifié.
	Numéro de série	Indique le numéro de série du fabriquant afin de permettre l'identification d'un dispositif médical spécifique.
	Avertissement	Indique qu'il faut être prudent lors de l'utilisation du dispositif ou de la commande à proximité de l'endroit où le symbole est placé, ou indique que la situation actuelle nécessite une vigilance ou une action de l'opérateur afin d'éviter des conséquences indésirables.
	Dispositif médical	Indique que l'article est un dispositif médical.
	Identificateur unique du dispositif	Indique un code à barres contenant des informations d'identification unique du dispositif.
	Marquage CE	Conformité européenne.
	Usage unique	Indique que l'article est un dispositif médical à usage unique.



Fabriquant

SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 États-Unis

Numéro gratuit (888) 724-8763 | Tél (781) 982-7000 | Fax (781) 982-7001 | orders@schuremed.com



Représentant agréé

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP La Haye, Pays-Bas