

Instructions d'utilisation

- REF** Deluxe Rail Clamp 800-0248
- REF** Deluxe Rail Clamp (EU) 800-0248-EU
- REF** Deluxe Rail Clamp (UK) 800-0248-UK
- REF** Deluxe Rail Clamp (DEN) 800-0248-DEN
- REF** Deluxe Rail Clamp (JPN) 800-0248-JPN
- REF** Deluxe Rail Clamp (SWISS) 800-0248-SWISS

UTILISATION PRÉVUE

Ce dispositif est destiné à maintenir les accessoires chirurgicaux sur une table chirurgicale. Les utilisateurs prévus de ce dispositif médical sont les professionnels de la santé au sein des hôpitaux et centres chirurgicaux.

INSTRUCTIONS

Se familiariser avec les caractéristiques du dispositif de positionnement du patient avant de l'utiliser avec le patient. Avant usage clinique, toujours s'entraîner sur un infirmier, un médecin ou un volontaire approprié.

Le clamp de rail Deluxe se fixe n'importe où le long du rail latéral de la table chirurgicale. Elle accepte les colonnes de montage rondes de 1,6 cm (5/8") de diamètre et les colonnes de montage plates de 2,5 cm x 0,95 cm (1" x 3/8"). Permet de maintenir les accessoires en position verticale ou horizontale.

Fixation au rail latéral

1. Fixez le clamp sur le rail
2. Placez la colonne de montage dans le trou de montage
3. Tournez la poignée du clamp dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller en toute sécurité

Détacher du rail latéral

1. Tournez la poignée du clamp dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la déverrouiller et la retirer du rail

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Dimensions du dispositif (maximum)

- Longueur : 8 cm +/- 1 cm (3" +/- 0,5") (Poignée repliée)
- Largeur : 5 cm +/- 1 cm (2" +/- 0,5") (Poignée dépliée)
- Profondeur : 10 cm +/- 1 cm (4" +/- 0,5") (avec poignée de rail)
- Poids du dispositif : 0,45 kg +/- 0,22 kg (1 lb +/- 0,5 lb)
- Se fixe au rail de la table chirurgicale, n'importe où sur le rail



- *Installation pour une seule personne*
- *Peut accueillir des accessoires jusqu'à 2,5 cm x 0,95 cm (1 x 3/8") pour les colonnes de montage plates et jusqu'à 5/8" (1,6 cm) pour les colonnes de montage rondes*

APERÇU DES COMPOSANTS

Le clamp de rail Deluxe est un clamp de table chirurgicale qui se fixe aux rails latéraux d'une table chirurgicale. Sa fonction est de maintenir les accessoires chirurgicaux sur une table chirurgicale.

Voir les dimensions du rail latéral ci-dessous :

États-Unis : 9,5 mm x 28,5 mm (0,374" x 1,122") Réf. 800-0248

Denyer : 6 mm x 38 mm (0,236" x 1,496") Réf. 800-0248-DEN

Europe : 10 mm x 25 mm (0,394" x 0,984") Réf. 800-0248-EU

Eschmann (UK) : 6 mm x 32 mm (0,236" x 1,260") Réf. 800-0248-UK

Japon : 9 mm x 32 mm (0,354" x 1,260") Réf. 800-0248-JPN

Suisse : 10 mm x 30 mm (0,394" x 1,181") Réf. 800-0248-SWISS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- *Produit fabriqué sans latex de caoutchouc naturel*
- *L'outil peut supporter 227 kg (500 lb) de charge proportionnelle pour un patient (de 193 cm (6'4") pour 99 % des corps humains)*
- *La garantie du produit couvre tout défaut de fabrication du produit pendant une période de 2 ans*
- *En cas de dommage lors de l'envoi, appeler le Service client au +1 888 724-8763 ou +1 781 982-7000 pour obtenir un Numéro d'autorisation de retour de matériel. Pour les questions de garantie de produit, contacter le Service client.*
- *Dispositif médical marqué CE conformément au MDR (Règlement relatif aux dispositifs médicaux) (EU) 2017/745*
- *Le produit ne requiert aucun entretien, vérifier le produit avant de le réutiliser*
- *La durée de vie du dispositif est de 5 ans pour une utilisation normale*
- *Stocker le dispositif entre -20 °C et 30 °C (-4 °F et +86 °F)*