

Gebrauchsanweisung

- REF** Deluxe Rail Clamp 800-0248
- REF** Deluxe Rail Clamp (EU) 800-0248-EU
- REF** Deluxe Rail Clamp (UK) 800-0248-UK
- REF** Deluxe Rail Clamp (DEN) 800-0248-DEN
- REF** Deluxe Rail Clamp (JPN) 800-0248-JPN
- REF** Deluxe Rail Clamp (SWISS) 800-0248-SWISS

VERWENDUNGSZWECK

Der Verwendungszweck ist die Befestigung von chirurgischem Zubehör am OP-Tisch. Das Produkt ist für medizinisches Fachpersonal in Krankenhäusern und Operationszentren bestimmt.

ANWEISUNGEN

Machen Sie sich mit den Funktionen des Produkts zur Patientenlagerung vertraut, bevor Sie es am Patienten verwenden. Üben Sie die Anwendung immer an einer Pflegekraft, einem Arzt oder einem geeigneten Freiwilligen, bevor Sie das Produkt klinisch einsetzen.

Die Deluxe Rail Clamp lässt sich an jedem Punkt der Seitenschiene des Operationstisches befestigen. Das Produkt nimmt sowohl runde Montagegängen mit Durchmesser 5/8" (1,6 cm) als auch rechteckige Montagegängen von 1" x 3/8" (2,5 cm x 0,95 cm). Hält Zubehör in vertikaler oder horizontaler Position.

Anbringen an Seitenschiene

1. Klemme an Schiene anbringen
2. Montagegange in Montageloch platzieren
3. Klemmengriff zum Arretieren im Uhrzeigersinn drehen

Lösen von Seitenschiene

1. Klemmengriff zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn drehen und von Schiene entfernen

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Produktabmessungen (Maximalwerte)

- Länge: 3" +/- 0,5" (8 cm +/- 1 cm) (Griff eingeklappt)
- Breite: 2" +/- 0,5" (5 cm +/- 1 cm) (Griff ausgeklappt)
- Tiefe: 4" +/- 0,5" (10 cm +/- 1 cm) (mit Schienengriff)
- Produktgewicht: 1 +/- 0,5 lbs. (0,45 kg +/- 0,22 kg)



- *Befestigung an der Schiene des Operationstisches an einem beliebigen Punkt der Schiene*
- *Ein-Personen-Montage*
- *Hält Zubehörgeräte mit rechteckiger Montagestange bis 1 x 3/8“ (2,5 cm x 0,95 cm) und runder Montagestange bis 5/8“ (1,6 cm)*

KOMPONENTEN-ÜBERSICHT

Die Deluxe Rail Clamp ist eine OP-Tischklemme zur Montage an der Seitenschiene des Operationstisches. Sie dient der Befestigung von chirurgischem Zubehör am OP-Tisch.

Siehe Abmessungen der Seitenschienen unten:

US: 0,374“ x 1,122“ (9,5 mm x 28,5 mm) PN# 800-0248

Denyer: 0,236“ x 1,496“ (6 mm x 38 mm) PN# 800-0248-DEN

Europa: 0,394“ x 0,984“ (10 mm x 25 mm) PN# 800-0248-EU

Eschmann (UK): 0,236“ x 1,260“ (6 mm x 32 mm) PN# 800-0248-UK

Japan: 0,354“ x 1,260“ (9 mm x 32 mm) PN# 800-0248-JPN

Schweiz: 0,394“ x 1,181“ (10 mm x 30 mm) PN# 800-0248-SWISS

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- *Das Produkt enthält keinen Naturkautschuklatex.*
- *Das Produkt trägt 500 lb. (227 kg) proportionale Patientenbelastung (193 cm (6'4“) großer Patient pro 99 % menschliches Körpermodell).*
- *Die Produktgarantie deckt Herstellungsfehler für 2 Jahre.*
- *Bei Transportschäden rufen Sie bitte den Kundendienst unter (888) 724-8763 oder (781) 982-7000 an, um eine Rücksendegenehmigungsnummer zu erhalten. Bei Fragen zur Produktgarantie wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.*
- *CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt gemäß MDR (EU) 2017/745*
- *Das Produkt ist wartungsfrei, überprüfen Sie den Zustand des Produkts vor dem nächsten Gebrauch.*
- *Die Lebensdauer des Produkts beträgt 5 Jahre bei normalem Gebrauch.*
- *Produkt zwischen -4 °F bis +86 °F (-20 °C und 30 °C) lagern.*