

Istruzioni per l'uso

- REF** Deluxe Rail Clamp 800-0248
- REF** Deluxe Rail Clamp (EU) 800-0248-EU
- REF** Deluxe Rail Clamp (UK) 800-0248-UK
- REF** Deluxe Rail Clamp (DEN) 800-0248-DEN
- REF** Deluxe Rail Clamp (JPN) 800-0248-JPN
- REF** Deluxe Rail Clamp (SWISS) 800-0248-SWISS

USO PREVISTO

L'uso previsto è quello di sostenere gli accessori chirurgici sul tavolo operatorio. Gli utenti previsti di questo dispositivo sono i professionisti del settore medico in ospedali e centri chirurgici.

ISTRUZIONI

Acquisire familiarità con le caratteristiche del dispositivo di posizionamento del paziente prima di utilizzarlo con un paziente. Fare sempre pratica con un infermiere, un medico o un volontario appropriato prima dell'uso clinico.

Il Morsetto Deluxe per binario si collega a qualsiasi punto del binario laterale del tavolo. È adatto sia per i pali di montaggio rotondo con diametro 5/8" (1,6 cm) sia per i pali per montaggio con barra piatta 1" x 3/8" (2,5 cm x 0,95 cm). Sostiene gli accessori in posizione verticale o orizzontale.

Attacco al binario laterale

1. Attacco del morsetto al binario
2. Posizionare il palo di montaggio nella cavità per il montaggio
3. Ruotare la maniglia del morsetto in senso orario per fissare il bloccaggio

Scollegamento dal binario laterale

1. Ruotare la maniglia del morsetto in senso antiorario per sbloccare e rimuovere dal binario

SPECIFICHE GENERALI

Dimensioni del dispositivo (massime)

- Lunghezza: 3" +/- 0,5" (8 cm +/- 1 cm) (maniglia chiusa)
- Larghezza: 2" +/- 0,5" (5 cm +/- 1 cm) (maniglia estesa)
- Spessore: 4" +/- 0,5" (10 cm +/- 1 cm) (con maniglia del binario)
- Peso del dispositivo: 1 +/- 0,5 libbre (0,45 kg +/- 0,22 kg)
- Si collega al binario del tavolo operatorio in qualsiasi punto
- Installabile da una sola persona
- Sostiene accessori con palo di montaggio piatto fino a 1 x 3/8" (2,5 cm x 0,95 cm) e pali di montaggio rotondo fino a 5/8" (1,6 cm)



PANORAMICA DEI COMPONENTI

Il Morsetto Deluxe per binario è un morsetto per tavolo operatorio adatto ai binari laterali dei tavolo operatori. Serve a sostenere gli accessori chirurgici sul tavolo operatorio.

Vedere le dimensioni dei binari laterali di seguito:

USA: 0,374" x 1,122" (9,5 mm x 28,5 mm) PN# 800-0248

Denyer: 0,236" x 1,496" (6 mm x 38 mm) PN# 800-0248-DEN

Europa: 0,394" x 0,984" (10 mm x 25 mm) PN# 800-0248-EU

Eschmann (UK): 0,236" x 1,260" (6 mm x 32 mm) PN# 800-0248-UK

Giappone: 0,354" x 1,260" (9 mm x 32 mm) PN# 800-0248-JPN

Svizzera: 0,394" x 1,181" (10 mm x 30 mm) PN# 800-0248-SWISS

INFORMAZIONI GENERALI

- Prodotto non realizzato con lattice di gomma naturale
- Il dispositivo supporta 227 kg (500 libbre) di carico proporzionale del paziente (paziente alto 193 cm (6'4") per modello di corpo umano al 99%)
- La garanzia del prodotto copre il prodotto dai difetti di fabbricazione per un periodo di 2 anni
- Se danneggiato durante la spedizione, chiamare il Servizio Clienti al (888) 724-8763 o +1 (781) 982-7000 per ottenere il numero di autorizzazione al reso del materiale. Per problemi inerenti la garanzia del prodotto, contattare il Servizio Clienti.
- Dispositivo medico con marchio CE conforme a MDR (UE) 2017/745
- Il prodotto non richiede manutenzione; controllare le condizioni del prodotto prima del successivo utilizzo
- La vita utile del dispositivo è di 5 anni in condizioni di uso normale
- Conservare il dispositivo a una temperatura da -4°F a $+86^{\circ}\text{F}$ (da -20°C a 30°C)