

## Instructions d'utilisation

**REF** Universal Rail Clamp 800-0085

### UTILISATION PRÉVUE

Ce dispositif est destiné à maintenir les accessoires chirurgicaux sur une table chirurgicale. Les utilisateurs prévus de ce dispositif médical sont les professionnels de la santé au sein des hôpitaux et centres chirurgicaux.



### INSTRUCTIONS

Se familiariser avec les caractéristiques du dispositif de positionnement du patient avant de l'utiliser avec le patient. Avant usage clinique, toujours s'entraîner sur un infirmier, un médecin ou un volontaire approprié.

Le clamp de rail universelle est monté sur ressort ; il se fixe n'importe où sur le rail latéral de la table chirurgicale. Se fixe à tous les rails latéraux d'une table chirurgicale de 0,95 cm de large x 3 cm de haut (3/8" x 1-1/8"). Le clamp accepte toutes les colonnes de montage rondes jusqu'à 1,6 cm (5/8") de diamètre et les colonnes de montage rectangulaires jusqu'à 2,5 cm x 0,95 cm (1" x 3/8").

### Fixation au rail latéral

1. Fixez le clamp sur le rail
2. Tournez la poignée du clamp dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller solidement

### Détacher du rail latéral

1. Tournez la poignée du clamp dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la déverrouiller et la retirer du rail

### SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

*Dimensions du dispositif (maximum)*

- Longueur : 8 cm +/- 1 cm (3" +/- 0,5") (Poignée repliée),  
14 cm +/- 1 cm (5,5" +/- 0,5") (Poignée dépliée)
- Largeur : 5 cm +/- 1 cm (2" +/- 0,5")
- Profondeur : 10 cm +/- 1 cm (4" +/- 0,5")
- Poids du dispositif : 0,45 kg +/- 0,22 kg (1 lb +/- 0,5 lb)
- Se fixe au rail de la table chirurgicale, n'importe où sur le rail
- Installation pour une seule personne
- Permet de maintenir des accessoires d'un diamètre maximal de 1,6 cm (5/8") et une colonne de montage plate de 2,5 cm x 0,95 cm (1" x 3/8")

## **APERÇU DES COMPOSANTS**

Le clamp de rail universelle est un clamp pour table chirurgicale qui se fixe à tous les rails aux États-Unis. Sa fonction est de maintenir les accessoires chirurgicaux sur une table chirurgicale.

*Dimensions du rail latéral ci-dessous :*

**États-Unis** : 9,5 mm x 28,5 mm (0,374 x 1,122")

## **INFORMATIONS GÉNÉRALES**

- *Produit fabriqué sans latex de caoutchouc naturel*
- *Le dispositif peut supporter 159 kg (350 lb) de charge proportionnelle pour un patient (de 193 cm (6'4") selon 99 % des corps humains)*
- *La garantie du produit couvre tout défaut de fabrication du produit pendant une période de 2 ans*
- *En cas de dommage lors de l'envoi, appeler le Service client au +1 888 724-8763 ou +1 781 982-7000 pour obtenir un Numéro d'autorisation de retour de matériel. Pour les questions de garantie de produit, contacter le Service client.*
- *Dispositif médical marqué CE conformément au MDR (Règlement relatif aux dispositifs médicaux) (EU) 2017/745*
- *Le produit ne requiert aucun entretien, vérifier le produit avant de le réutiliser*
- *La durée de vie du dispositif est de 5 ans pour une utilisation normale*
- *Stocker le dispositif entre -20 °C et 30 °C (-4 °F et +86 °F)*