

## Gebrauchsanweisung

- REF** Schure Socket 800-0006
- REF** Schure Socket (DEN) 800-0006-DEN
- REF** Schure Socket (EU) 800-0006-EU
- REF** Schure Socket (JPN) 800-0006-JPN
- REF** Schure Socket (SWISS) 800-0006-SWISS
- REF** Schure Socket (UK) 800-0006-UK

### VERWENDUNGSZWECK

Der Verwendungszweck ist das Halten von OP-Zubehör mit einer Stange von 0,625“ (1,6 cm) an einem OP-Tisch. Das Produkt ist für medizinisches Fachpersonal in Krankenhäusern und Operationszentren bestimmt.



### ANWEISUNGEN

Machen Sie sich mit den Funktionen des Produkts zur Patientenlagerung vertraut, bevor Sie es an einem Patienten anwenden. Üben Sie die Verwendung immer an einer Pflegekraft, einem Arzt oder einem geeigneten Freiwilligen, bevor Sie das Produkt klinisch einsetzen.

#### Anbringen an Seitenschiene

1. Schure Socket mit Logo nach oben an der Seitenschiene des OP-Tisches anbringen
2. Runde Montagestange (5/8“, 1,6 cm) in das Befestigungsloch einführen
3. Klemme durch Drehen des Griffs im Uhrzeigersinn in arretierter Position sichern

#### Lösen von Seitenschiene

1. Klemme durch Drehen des Griffs gegen den Uhrzeigersinn lösen und Montagestange entfernen

### ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Produktabmessungen (Maximalwerte)

- Länge: 3“ +/- 0,5“ (8 cm +/- 1 cm)
- Breite: 2“ +/- 0,5“ (5 cm +/- 1 cm)
- Tiefe: 8“ +/- 0,5“ (20 cm +/- 1 cm) (Schiengriff ausgeklappt)
- Produktgewicht: 1,5 +/- 0,5 lbs. (0,68 kg +/- 0,22 kg)
- Befestigung überall an der Schiene des Operationstisches
- Ein-Personen-Montage
- Drehgriff zum Sichern/Lösen
- Hält Zubehörgeräte mit Montagestangen bis zu einem Durchmesser von 5/8“ (1,6 cm)

## **KOMPONENTEN-ÜBERSICHT**

Schure Socket ist eine OP-Tischklemme, die sich an allen Schienen befestigen lässt. Sie dient der Befestigung von OP-Zubehör am OP-Tisch.

*Siehe Abmessungen der Seitenschienen unten.*

**USA:** 0,374“ x 1,122“ (9,5 mm x 28,5 mm) PN# 800-0006

**Denyer:** 0,236“ x 1,496“ (6 mm x 38 mm) PN# 800-0006-DEN

**Europa:** 0,394“ x 0,984“ (10 mm x 25 mm) PN# 800-0006-EU

**Eschmann (UK):** 0,236“ x 1,260“ (6 mm x 32 mm) PN# 800-0006-UK

**Japan:** 0,354“ x 1,260“ (9 mm x 32 mm) PN# 800-0006-JPN

**Schweiz:** 0,394“ x 1,181“ (10 mm x 30 mm) PN# 800-0006-SWISS

## **ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

- *Das Produkt enthält keinen Naturkautschuklatex.*
- *Das Produkt trägt 500 lb. (227 kg) proportionale Patientenbelastung (193 cm (6'4“) großer Patient pro 99 % menschliches Körpermodell).*
- *Die Produktgarantie deckt Herstellungsfehler für 2 Jahre.*
- *Bei Transportschäden rufen Sie bitte den Kundendienst unter (888) 724-8763 oder (781) 982-7000 an, um eine Rücksendegenehmigungsnummer zu erhalten. Bei Fragen zur Produktgarantie wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.*
- *CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt gemäß MDR (EU) 2017/745*
- *Das Produkt ist wartungsfrei, überprüfen Sie den Zustand des Produkts vor dem nächsten Gebrauch.*
- *Die Lebensdauer des Produkts beträgt 5 Jahre bei normalem Gebrauch.*
- *Produkt zwischen -4 °F bis +86 °F (-20 °C und 30 °C) lagern.*