

## Gebrauchsanweisung

**REF** Universal Rail Clamp 800-0085

### VERWENDUNGSZWECK

Der Verwendungszweck ist die Befestigung von OP-Zubehör am OP-Tisch. Das Produkt ist für medizinisches Fachpersonal in Krankenhäusern und Operationszentren bestimmt.



### ANWEISUNGEN

Machen Sie sich mit den Funktionen des Produkts zur Patientenlagerung vertraut, bevor Sie es am Patienten verwenden. Üben Sie die Verwendung immer an einer Pflegekraft, einem Arzt oder einem geeigneten Freiwilligen, bevor Sie das Produkt klinisch einsetzen.

Die Universal Rail Clamp ist federvorgespannt und kann überall an der Seitenschiene des OP-Tisches befestigt werden. Kann an allen Seitenschiene mit Abmessungen 3/8" B x 1-1/8" H (0,95 cm x 3 cm) befestigt werden. Die Klemme nimmt runde Montagestangen mit Durchmesser bis 5/8" (1,6 cm) und rechteckige Montagestangen bis 1" x 3/8" (2,5 cm x 0,95 cm) auf.

### Anbringen an Seitenschiene

1. Klemme an Schiene anbringen
2. Klemmengriff zum Arretieren im Uhrzeigersinn drehen

### Lösen von Seitenschiene

1. Klemmengriff zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn drehen und von Schiene entfernen

### ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Produktabmessungen (Maximalwerte)

- Länge: 3" +/- 0,5" (8 cm +/- 1 cm) (Griff eingeklappt),  
5,5" +/- 0,5" (14 cm +/- 1 cm) (Griff ausgeklappt)
- Breite: 2" +/- 0,5" (5 cm +/- 1 cm)
- Tiefe: 4" +/- 0,5" (10 cm +/- 1 cm)
- Produktgewicht: 1 +/- 0,5 lbs. (0,45 kg +/- 0,22 kg)
- Befestigung an einem beliebigen Punkt der Schiene des Operationstisches
- Ein-Personen-Montage
- Hält Zubehörgeräte mit Durchmesser bis 5/8" (1,6 cm) und rechteckige Montagestangen bis 1" x 3/8" (2,5 cm x 0,95 cm)

## **KOMPONENTEN-ÜBERSICHT**

Die Universal Rail Clamp ist eine OP-Tischklemme, die sich an allen USA-Schienen befestigen lässt. Sie dient der Befestigung von chirurgischem Zubehör am OP-Tisch.

*Abmessungen der Seitenschienen unten:*

*USA: 0,3742“ +/- 1,1222“ (9,5 mm x 28,5 mm)*

## **ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

- *Das Produkt enthält keinen Naturkautschuklatex.*
- *Das Produkt trägt 350 lb. (159 kg) proportionale Patientenbelastung (6'4" (193 cm) großer Patient pro 99 % menschliches Körpermodell).*
- *Die Produktgarantie deckt Herstellungsfehler für 2 Jahre.*
- *Bei Transportschäden rufen Sie bitte den Kundendienst unter (888) 724-8763 oder (781) 982-7000 an, um eine Rücksendegenummer zu erhalten. Bei Fragen zur Produktgarantie wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.*
- *CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt gemäß MDR (EU) 2017/745*
- *Das Produkt ist wartungsfrei, überprüfen Sie den Zustand des Produkts vor dem nächsten Gebrauch.*
- *Die Lebensdauer des Produkts beträgt 5 Jahre bei normalem Gebrauch.*
- *Produkt zwischen -4 °F bis +86 °F (-20 °C und 30 °C) lagern.*