

Bruksanvisning

REF	Schure Socket XL	800-0134
REF	Schure Socket XL (EU)	800-0134-EU
REF	Schure Socket XL (UK)	800-0134-UK
REF	Schure Socket XL (DEN)	800-0134-DEN
REF	Schure Socket XL (JPN)	800-0134-JPN
REF	Schure Socket XL (SWISS)	800-0134-SWISS

TILTENKT BRUK

Tiltenkt bruk er å holde operasjonsbordtilbehør på et operasjonsbord. De tiltenkte brukerne av denne enheten er medisinske fagpersoner på sykehus og kirurgisentre.

INSTRUKSJONER

Gjør deg kjent med egenskapene til pasientplasseringsenheten før du bruker den på pasienten. Øv deg alltid på en pleier, lege eller annen frivillig person før du benytter den klinisk.

Passer alle standard operasjonsbord med sideskinner 3/8" W x 1-1/8" H (.95 cm x 3 cm). Sokkelen passer til alle runde monteringsstolper opptil 5/8" (1.6 cm) i diameter og rektangulære monteringsstolper opp til 1" x 3/8" (2.5 cm x .95 cm).

Montering av klemme til operasjonsbordet

1. Fest Schure Socket XL til operasjonsbordets sideskinner med logomerket opp
2. Plasser rund eller flat stolpe i sokkelen
3. For å stramme stolpen, dreii håndtaket med klokken til den er låst

Løsne klemmene fra operasjonsbordet

1. Dreii håndtaket mot klokken til stolpen løsner
2. Fjern stolpen fra sokkelen
3. Løsne fra sideskinnen

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Enhetens mål (maksimum)

- Lengde: 4" +/- 0.5" (10 cm +/- 1 cm)
- Bredde: 2.25" +/- 0.5" (6 cm +/- 1 cm)
- Dybde: 2.25" +/- 0.5" (6 cm +/- 1 cm)
- Enhetens vekt: 1.5 +/- 0.5 lbs. (.68 kg +/- .22 kg)
- Festes til sideskinnen på et kirurgisk bord uavhengig av sted
- Installerer av én person
- Dreilås/Frigjøringshåndtak



OVERSIKT OVER KOMPONENTER

Schure Socket XL er en kirurgisk bordklemme som kan festes på sideskinner til ethvert bord.

Se sideskinnens dimensjoner under:

USA: 0.374" x 1.122" (9.5 mm x 28.5 mm) PN# 800-0134

Denyer: 0.236" x 1.496" (6 mm x 38 mm) PN# 800-0134-DEN

Europa: 0.394" x 0.984" (10 mm x 25 mm) PN# 800-0134-EU

Eschmann (Storbritannia): 0.236" x 1.260" (6 mm x 32 mm) PN# 800-0134-UK

Japan: 0.354" x 1.260" (9 mm x 32 mm) PN# 800-0134-JPN

Sveits: 0.394" x 1.181" (10 mm x 30 mm) PN# 800-0134-SWISS

GENERELL INFORMASJON

- Produktet er ikke laget av naturgummilateks
- Enheten støtter 363 kg (363 kg) proporsjonal pasientbelastning (6'4" (193 cm) høy pasient per 99 % kroppsmodell
- Produktgarantien dekker produktet mot produksjonsfeil i en periode på 2 år.
- Hvis produktet har blitt skadet under forsendelse, kan du ringe kundetjenesten på (888) 724-8763 eller (781) 982-7000 for å få et returnnummer. Kontakt kundetjenesten hvis du har spørsmål om produktgarantien.
- CE-merket medisinsk enhet i henhold til MDR (EU) 2017/745
- Produktet er vedlikeholdsfritt, kontroller tilstanden til produktet før neste gangs bruk
- Enheten har en levetid på 5 år ved normal bruk.
- Oppbevar enheten mellom -4°F og +86 °F (-20°C og +30°C)

AVHENDING

- **Generelt** - Unngå infeksjon ved å vaske og desinfisere produktet før avhending
- **Forpakning** - Kast innpakningsmaterialet i husholdningsavfallet i henhold til nasjonale retningslinjer
- SchureMed tar i mot brukte og gamle produkter - eller kaster produktet i henhold til nasjonale retningslinjer



ADVARSLER KNYTTET TIL BRUK AV PRODUKTET

ADVARSEL! Maksimal belastning plassert på produktet på ikke overskride den aktuelle proporsjonen til en pasient som veier 363 kg (363 kg). Bruk med forsiktighet ved lav-maksimal vekt slik at ikke operasjonsbordets skinner blir overbelastet. Følg nøye instruksjonene for bruk sammen med ditt operasjonsbord system



ADVARSEL! Enheten må ikke gjenbrukes hvis det er klare tegn på skade eller funksjonsproblemer. Snakk med produsent før gjenbruk.

ANBEFALINGER FOR RENGJØRING

Følg alltid gjeldende AORN-journalretningslinjer for å sikre riktig fremgangsmåte for rengjøring og desinfeksjon.

ADVARSEL

Les og følg produsentens instruksjoner for rengjøringprodukter nøye. IKKE BRUK rengjøringprodukter som inneholder fenoler.

1. Større urenheter fjernes fra utstyret med engangsmateriale. Følg passende prosedyre for fjerning av biologisk farlig avfall.

2. Påhør rikelig med rengjøringsmiddel på utstyret, tørk av med en ren lofri klut til all fuktighet og rengjøringsmiddel er fjernet fra utstyret
3. La utstyret tørke

BRUKERVARSEL




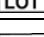
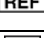
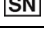


Enhver alvorlig hendelse som har skjedd i forbindelse med enheten, skal rapporteres til produsenten og vedkommende myndighet i medlemsstaten der brukeren og / eller pasienten er etablert.

UDI Grunnleggende UDI-DI: 081001460F0010DK

eIFU språkversjoner

For å laste ned og skrive ut bruksanvisningen, gå til <http://www.schuremed.com/schuremed-eifu>.

Symbolliste

Symbol	Tittel	Symbolbeskrivelse
	Produsent	Indikerer produsenten av den medisinske enheten
	Autorisert representant i EU	Indikerer autorisert representant i EU.
	Utløpsdato	Indikerer best før-dato, etter denne skal ikke den medisinske enheten brukes.
	Produksjonsnummer	Indikerer produsentens produksjonsnummer for identifisering av parti eller serie.
	Katalog- eller artikkelnummer	Indikerer produsentens katalog- eller artikkelnummer, slik at den medisinske enheten kan identifiseres.
	Serienummer	Indikerer produsentens serienummer for identifisering av en spesifikk medisinsk enhet.
	Forsiktig	For å indikere at forsiktighet er nødvendig ved bruk av enheten eller kontrollen i nærheten av hvor symbolet er plassert, eller for å indikere at den gjeldende situasjonen krever operatørens forståelse eller handling for å unngå uønskede konsekvenser.
	Medisinsk enhet	Indikerer at artikkelen er en medisinsk enhet.
	Unik enhetsidentifikator	Indikerer en strekkode som inneholder unik informasjon av enhetsidentifikator.
	CE-merking	Europeisk samsvar.
	Kun for bruk på en pasient	Indikerer at artikkelen er en medisinsk enhet kun for bruk på en pasient.



Produsent

SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Gratisnummer (888) 724-8763 | **Tlf** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | **orders@schuremed.com**



EC REP **Autorisert representant**

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP Haag, Nederland