

Bruksanvisning

REF Universal Prepper 800-0161

Erstatningspute

Universal Prepper Pad 508-0159

TILTENKT BRUK

Tiltentkt bruk er å holde øvre eller nedre ekstremiteter trygt og effektivt, med sin unike design som muliggjør mange posisjoner for ekstremiteter under preoperative forberedelser. De tiltentkte brukerne av denne enheten er medisinske fagpersoner på sykehus og kirurgisentre.



INSTRUKSJONER

Gjør deg kjent med egenskapene til pasientplasseringsenheten før du bruker den på pasienten. Øv deg alltid på en pleier, lege eller annen frivillig person før du benytter den klinisk.

Feste av Universal Prepper til kirurgisk bord

1. Fest Schure Socket XL P/N 800-0134 (solgt separat) til side skinnene
2. Sett monteringsstolpen inn i fatningen - lås fast
3. Lås opp fotstøtten og flytt den i ønsket posisjon, vri håndtaket for å låse.

Fjerning av Universal Prepper fra kirurgisk bord

1. Vri håndtaket mot klokken for å løsne og fjerne

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Enhetens mål (maksimum)

- Lengde: 36.5" +/- 0.5" (93 cm +/- 1 cm)
- Bredde: 11" +/- 0.5" (28 cm +/- 1 cm)
- Dybde: 10" +/- 0.5" (25 cm +/- 1 cm)
- Enhetens vekt: 5 +/- 0.5 lbs. (2 +/- .22 kg)
- 5/8" (1.6 cm) cm diameter stang i festet
- Installerer av én person
- Dreilås/Frigjøringshåndtak

KOMPONENTOVERSIKT

UNIVERSAL PREPPER er tilbehør til kirurgiske bord som holder øvre eller nedre ekstremiteter trygt og effektivt. Unikt svingbart design som muliggjør mange posisjoner for ekstemiteter.

Erstatningspute: Universal Prepper Pad 508-0159

Andre nødvendige produkter for bruk:

800-0134 Schure Feste XL (selges separat)

USA: 0.374" x 1.122" (9.5 mm x 28.5 mm) PN# 800-0134

Denyer: 0.236" x 1.496" (6 mm x 38 mm) PN# 800-0134-DEN

Europa: 0.394" x 0.984" (10 mm x 25 mm) PN# 800-0134-EU

Eschmann (Storbritannia): 0.236" x 1.260" (6 mm x 32 mm) PN# 800-0134-UK

Japan: 0.354" x 1.260" (9 mm x 32 mm) PN# 800-0134-JPN

Sveits: 0.394" x 1.181" (10 mm x 30 mm) PN# 800-0134-SWISS

GENERELL INFORMASJON

- Produktet er ikke laget av naturgummilateks
- Enheten støtter 227 kg (227 kg) Denne enheten understøtter en proporsjonal pasientbelastning (6'4" (193 cm) høy pasient per 99 % kroppsmodell)
- Produktgarantien dekker produktet mot produksjonsfeil i en periode på 2 år.
- Hvis det har blitt skadet under forsendelse, kan du ringe kundetjenesten på (888) 724-8763 eller (781) 982-7000 for å få et returnummer. Kontakt kundetjenesten hvis du har spørsmål om produktgarantien.
- CE-merket medisinsk enhet i henhold til MDR (EU) 2017/745
- Produktet er vedlikeholdsfritt, kontroller tilstanden til produktet før neste gangs bruk
- Enheten har en levetid på 5 år ved normal bruk.
- Oppbevar enheten mellom -4°F og +86°F (-20°C og +30°C)

AVHENDING

- **Generelt** - Unngå infeksjon ved å vaske og desinfisere produktet før avhending
- **Forpakning** - Kast innpakningsmaterialet i husholdningsavfallet i henhold til nasjonale retningslinjer
- SchureMed tar i mot brukte og gamle produkter - eller kaster produktet i henhold til nasjonale retningslinjer



ADVARSLER KNYTTET TIL BRUK AV PRODUKTET

ADVARSEL! Maksimal belastning plassert på produktet på ikke overskride den aktuelle proporsjonen til en pasient som veier 227 kg. (227 kg). Bruk med forsiktighet ved lav-maksimal vekt slik at ikke operasjonsbordets skinner blir overbelastet.



ADVARSEL! Enheten må ikke gjenbrukes hvis det er klare tegn på skade eller funksjonsproblemer. Snakk med produsent før gjenbruk.



ADVARSEL! Fare som følge av feil bruk Følg instruksjonene nøye ved bruk sammen med ditt operasjonsbord system



ADVARSEL! Det kirurgiske bordets kapasitet kan være mindre. Overbelast aldri et kirurgisk bord. Enheten er kun ment for montering på sideskinnen på et kirurgisk bord.

ANBEFALINGER FOR RENGJØRING

Følg alltid gjeldende AORN-journalretningslinjer for å sikre riktig fremgangsmåte for rengjøring og desinfeksjon.



ADVARSEL!

Overhold standarder satt for håndtering av blodbårene patogener fra Statens Helsetilsyn. Bruk anbefalt verneutstyr, hansker, masker, og øyevern ved rengjøring av utstyr.

ADVARSEL

Les og følg produsentens instruksjoner for rengjøringprodukter nøye. IKKE BRUK rengjøringprodukter som inneholder fenoler.

1. Større urenheter fjernes fra utstyret med engangsmateriale. Følg passende prosedyre for fjerning av biologisk farlig avfall.
2. Påhør rikelig med rengjøringsmiddel på utstyret, tork av med en ren lofri klut til all fuktighet og rengjøringsmiddel er fjernet fra utstyret
3. La utstyret tørke

BRUKERVARSEL

Enhver alvorlig hendelse som har skjedd i forbindelse med enheten, skal rapporteres til produsenten og vedkommende myndighet i medlemsstaten der brukeren og / eller pasienten er etablert.

UDI Grunnleggende UDI-DI: 081001460F0002DL

eIFU språkversjoner

For å laste ned og skrive ut bruksanvisningen, gå til <http://www.schuremed.com/schuremed-eifu>.

Symbolliste

| Symbol | Tittel | Symbolbeskrivelse |
|--------|-------------------------------|---|
| | Produsent | Indikerer produsenten av den medisinske enheten |
| | Autorisert representant i EU | Indikerer autorisert representant i EU. |
| | Utløpsdato | Indikerer best før-dato, etter denne skal ikke den medisinske enheten brukes. |
| | Produksjonsnummer | Indikerer produsentens produksjonsnummer for identifisering av parti eller serie. |
| | Katalog- eller artikkelnummer | Indikerer produsentens katalog- eller artikkelnummer, slik at den medisinske enheten kan identifiseres. |
| | Serienummer | Indikerer produsentens serienummer for identifisering av en spesifikk medisinsk enhet. |
| | Forsiktig | For å indikere at forsiktighet er nødvendig ved bruk av enheten eller kontrollen i nærheten av hvor symbolet er plassert, eller for å indikere at den gjeldende situasjonen krever operatørens forståelse eller handling for å unngå uønskede konsekvenser. |
| | Medisinsk enhet | Indikerer at artikkelen er en medisinsk enhet. |
| | Unik enhetsidentifikator | Indikerer en strekkode som inneholder unik informasjon av enhetsidentifikator. |
| | CE-merking | Europeisk samsvar. |
| | Kun for bruk på en pasient | Indikerer at artikkelen er en medisinsk enhet kun for bruk på en pasient. |



Produsent

SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Gratisnummer (888) 724-8763 | **Tlf** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | **orders@schuremed.com**



EC REP Autorisert representant

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP Haag, Nederland