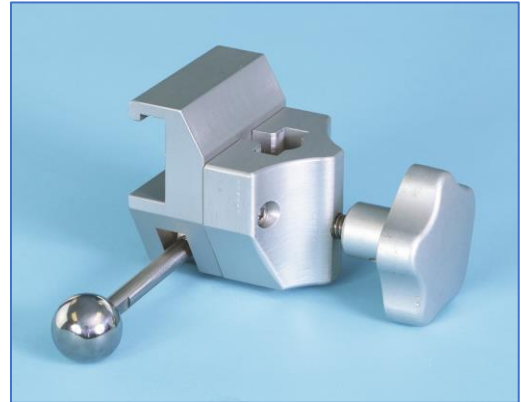


## Instrucciones de uso

- REF** CamLoc Rail Clamp 800-0271
- REF** CamLoc Rail Clamp, Grande 800-0271-L
- REF** CamLoc Rail Clamp (DEN) 800-0271-DEN
- REF** CamLoc Rail Clamp (EU) 800-0271-EU
- REF** CamLoc Rail Clamp (JPN) 800-0271-JPN
- REF** CamLoc Rail Clamp (SWISS) 800-0271-SWISS
- REF** CamLoc Rail Clamp (UK) 800-0271-UK



### USO PREVISTO

El uso previsto de la Abrazadera CamLoc es el soporte de accesorios en la mesa de operaciones. Los usuarios previstos de este dispositivo son los profesionales médicos de hospitales y centros quirúrgicos.

### INFORMACIÓN GENERAL





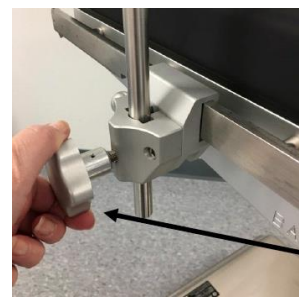
- *Escoja la abrazadera simple (800-0271) si va a utilizar 1-2 paños o la abrazadera grande (800-0271-L) si va a utilizar 3-5 paños.*
- *Producto no hecho con látex de caucho natural.*
- *El dispositivo aguanta una carga humana proporcional del 227 kg (500 lb) (en un paciente que mida 193 cm [6'4"] en base a un modelo del cuerpo humano del 99 %).*
- *La garantía del producto cubre los defectos de fabricación del producto durante un periodo de dos años.*
- *Si se daña el producto durante el envío, llame al servicio de atención al cliente al +1 (888) 724-8763 o +1 (781) 982-7000 para obtener el número de la autorización del material de devolución. En caso de tener problemas con la garantía del producto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.*
- *Producto sanitario con marcado CE según MDR (UE) 2017/745*
- *No es necesario realizar tareas de mantenimiento en el producto. Compruebe el estado del producto antes de usarlo la próxima vez.*
- *La vida útil del producto es de cinco años (con un uso normal).*
- *Almacene el dispositivo a una temperatura entre -20 °C y 30 °C (-4 °F y 86 °F)*

### ESPECIFICACIONES GENERALES

*Dimensiones del dispositivo (máximas)*

- *Longitud: 12 cm +/- 1 cm (4.75" +/- 0,5").*
- *Anchura: 13 cm +/- 1 cm (5" +/- 0,5").*
- *Profundidad: 6 cm +/- 1 cm (2,25" +/- 0,5").*
- *Peso del dispositivo: 0,9 kg +/- 0,22 kg (2 lb +/- 0,5 lb).*
- *Se acopla al rail de una mesa de operaciones desde cualquier punto del rail.*
- *Solo se necesita una persona para la instalación.*

## INSTRUCCIONES

	<p><b>Paso 1.</b> Coloque la abrazadera en el raíl, tal como se muestra.</p> <p><i>La CamLoc se engancha al raíl desde abajo. No se puede enganchar donde el raíl lateral tiene una hendidura, ya que no se asegurará ni bloqueará.</i></p>	
	<p><b>Paso 2.</b> Bloquee la abrazadera; para ello, gire la bolsa de acero inoxidable en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario, tal como se muestra.</p>	
	<p><b>Paso 3.</b> Introduzca el accesorio, tal como se muestra.</p>	
	<p><b>Paso 4.</b> Gire la rosca estrellada en el sentido de las agujas del reloj para bloquear el accesorio, tal como se muestra.</p>	

## RESUMEN DE LOS COMPONENTES

La Abrazadera CamLoc es una abrazadera para mesas de operaciones se acopla a los raíles laterales de cualquier mesa.

Consulte más abajo las dimensiones de los raíles laterales:

**EE. UU.:** 9,5 mm × 28,5 mm (0,374" × 1,122"), n.º 800-0271

**Denyer:** 6 mm × 38 mm (0,236" × 1,496"), n.º 800-0271-DEN

**Europa:** 10 mm × 25 mm (0,394" × 0,984"), n.º 800-0271-EU

**Eschmann (Reino Unido):** 6 mm × 32 mm (0,236" × 1,260"), n.º 800-0271-UK

**Japón:** 9 mm × 32 mm (0,354" × 1,260"), n.º 800-0271-JPN

**Suiza:** 10 mm × 30 mm (0,394" × 1,181"), n.º 800-0271-SWISS

## ELIMINACIÓN

- **General:** para prevenir infecciones, limpie y desinfecte el producto antes de desecharlo.
- **Envase:** deseche el material del envase con los residuos domésticos, de acuerdo con los requisitos nacionales.
- SchureMed acepta productos usados o retirados. También puede desecharse del producto de acuerdo con los requisitos nacionales.



## ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DEL PRODUCTO

### ADVERTENCIA.

La carga máxima no debe exceder la proporción adecuada de un paciente que pesa 227 kg (500 lb). En las mesas de operaciones bajas de carga máxima, procure que los railes complementarios no se sobrecarguen. Siga estrictamente las instrucciones de uso del sistema de la mesa de operaciones.



**¡ADVERTENCIA!** No reutilice el dispositivo si hay signos evidentes de daños o problemas de funcionamiento. Consulte al fabricante antes de reutilizar el dispositivo.

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Limpie bien la Abrazadera CamLoc antes de utilizarla y esterilícela después de cada uso.

- *Productos de limpieza recomendados (todos los productos se deben utilizar de acuerdo con las instrucciones del fabricante):*
  - Detergente enzimático de pH neutro
  - Se prefiere utilizar productos de limpieza enzimáticos compatibles con dispositivos/instrumentos de metálicos
  - Solución no enzimática a base de peróxido de hidrógeno
  - Limpiador en un paso Coverage Plus NPD, concentrado de desinfectante y desodorante

## LIMPIEZA MANUAL

- *Frote todas las piezas con un cepillo de fregado suave de plástico y un producto de limpieza recomendado (véase arriba).*
- *Enjuague bien todas las partes para eliminar los residuos químicos.*
- *Seque completamente todas las piezas con un paño limpio sin pelusas.*

## LIMPIEZA A MÁQUINA

- *Utilice la máquina o el descontaminador de acuerdo con las instrucciones del fabricante (seleccione el ciclo que no incluya lubricación).*
- *Prepare el dispositivo para la esterilización (debe limpiarse antes de esterilizarse).*
- *Consulte abajo las instrucciones de esterilización.*

*\* De acuerdo con la información proporcionada por el Comité asesor estadounidense de prácticas sanitarias de control de infecciones (HICPAC), el Centro estadounidense de control de enfermedades (CDC), el Centro estadounidense nacional de información biotecnológica (NCBI) y la Biblioteca nacional estadounidense de Medicina.*

## ESTERILIZACIÓN CON VAPOR

*Envuelva el producto con el método del sobre o el método de envoltura aceptado en su centro.*

### Prevacío

#### **Instrumentos envueltos**

*Tiempo de exposición a 132°C (270°F): 4 minutos*

*Tiempo de secado: 40 minutos*

## AVISO PARA EL USUARIO





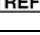
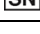





Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.

**UDI** UDI-DI básico: 081005737F0018KY

### Versiones lingüísticas de las instrucciones de uso en formato electrónico

Para descargar e imprimir las instrucciones de uso, visite <http://www.schuremed.com/schuremed-eifu>.

### Glosario de símbolos

Símbolo	Título	Descripción del símbolo
	Fabricante	Indica el fabricante del producto sanitario.
	Representante autorizado en la Comunidad Europea	Indica el representante autorizado en la Comunidad Europea.
	Fecha de caducidad	Indica la fecha a partir de la cual no se puede utilizar el producto sanitario.
	Código de lote	Indica el código de lote del fabricante para poder identificar el lote o la partida.
	Número de catálogo o de artículo	Indica el número de catálogo o de artículo del fabricante para poder identificar el producto sanitario.
	Número de serie	Indica el número de serie del fabricante para poder identificar un producto sanitario concreto.
	Precaución	Indica que es necesario tener precaución cuando se maneja el dispositivo o el control cerca de donde está colocado el símbolo, o que la situación actual necesita que el operario tenga especial cuidado o realice alguna acción para evitar consecuencias indeseables.
	Dispositivo médico	Indica que el artículo es un producto sanitario.
	Identificador único del dispositivo	Indica que un código de barras contiene información única de identificación del dispositivo.
	Marcado CE	Conformidad europea.
	Uso en un solo paciente	Indica que el artículo es un dispositivo médico de uso en un solo paciente.



#### Fabricante

SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351, EE. UU.

Línea de atención gratuita (888) 724-8763 | Ph (781) 982-7000 | Fax (781) 982-7001

| [orders@schuremed.com](mailto:orders@schuremed.com)



#### Representante autorizado

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP La Haya, Países Bajos