

Istruzioni per l'uso

REF Universal Rail Clamp 800-0085

USO PREVISTO

L'uso previsto è quello di sostenere gli accessori chirurgici sul tavolo operatorio. Gli utenti previsti di questo dispositivo sono i professionisti del settore medico in ospedali e centri chirurgici.



ISTRUZIONI

Acquisire familiarità con le caratteristiche del dispositivo di posizionamento del paziente prima di utilizzarlo con un paziente. Fare sempre pratica con un infermiere, un medico o un volontario appropriato prima dell'uso clinico.

Il Morsetto per binario universale è a molla e si attacca in qualsiasi punto del binario del tavolo operatorio. Si attacca in qualsiasi punto dei binari del tavolo operatorio che abbiano le dimensioni 3/8" W x 1-1/8" H (0,95 cm x 3 cm). Il morsetto è adatto per qualsiasi palo a montaggio rotondo con diametro fino a 5/8" (1,6 cm) e ai pali con montaggio rettangolare fino a 1" x 3/8" (2,5 cm x 0,95 cm).

Attacco al binario laterale

1. Attacco del morsetto al binario
2. Ruotare la maniglia del morsetto in senso orario per fissare la chiusura

Scollegamento dal binario laterale

1. Ruotare la maniglia del morsetto in senso antiorario per scollegare e rimuovere dal binario

SPECIFICHE GENERALI

Dimensioni del dispositivo (massime)

- Lunghezza: 3" +/- 0,5" (8 cm +/- 1 cm) (maniglia chiusa),
5,5" +/- 0,5" (14 cm +/- 1 cm) (maniglia estesa)
- Larghezza: 2" +/- 0,5" (5 cm +/- 1 cm)
- Spessore: 4" +/- 0,5" (10 cm +/- 1 cm)
- Peso del dispositivo: 1 +/- 0,5 libbre (0,45 kg +/- 0,22 kg)
- Si collega al binario del tavolo operatorio in qualsiasi punto
- Installabile da una sola persona
- Sostiene accessori con diametro fino a 5/8" (1,6 cm) e palo di montaggio piatto 1" x 3/8" (2,5 cm x 0,95 cm)

PANORAMICA DEI COMPONENTI

Il morsetto per binario universale è un morsetto per tavolo chirurgico adatto a tutti i binari disponibili negli Stati Uniti. Serve a sostenere gli accessori chirurgici sul tavolo operatorio.

Vedere le dimensioni dei binari laterali di seguito:

USA: 0,374" 1,122" (9,5 mm x 28,5 mm)

INFORMAZIONI GENERALI

- Prodotto non realizzato con lattice di gomma naturale
- Il dispositivo supporta 350 libbre (159 kg) di carico proporzionale del paziente (paziente alto 193 cm (6'4") per modello di corpo umano al 99%)
- La garanzia del prodotto lo copre dai difetti di fabbricazione per un periodo di 2 anni
- Se danneggiato durante la spedizione, chiamare il Servizio Clienti al (888) 724-8763 o +1 (781) 982-7000 per ottenere il numero di autorizzazione al reso del materiale. Per problemi inerenti la garanzia del prodotto, contattare il Servizio Clienti.
- Dispositivo medico con marchio CE conforme a MDR (UE) 2017/745
- Il prodotto non richiede manutenzione; controllare le condizioni del prodotto prima del successivo utilizzo
- La vita utile del dispositivo è di 5 anni in condizioni di uso normale
- Conservare il dispositivo a una temperatura da da -4°F a $+86^{\circ}\text{F}$ (da -20°C a 30°C)