

Istruzioni per l'uso

- REF** Schure Socket 800-0006
- REF** Schure Socket (DEN) 800-0006-DEN
- REF** Schure Socket (EU) 800-0006-EU
- REF** Schure Socket (JPN) 800-0006-JPN
- REF** Schure Socket (SWISS) 800-0006-SWISS
- REF** Schure Socket (UK) 800-0006-UK

USO PREVISTO

L'uso previsto è quello di supportare gli accessori di sala operatoria con un palo pari a 0,625" (1,6 cm) sul tavolo operatorio. Gli utenti previsti di questo dispositivo sono i professionisti del settore medico in ospedali e centri chirurgici.



ISTRUZIONI

Acquisire familiarità con le caratteristiche del dispositivo di posizionamento del paziente prima di utilizzarlo con un paziente. Fare sempre pratica con un infermiere, un medico o un volontario appropriato prima dell'uso clinico.

Attacco al binario laterale

1. Attaccare il Connettore Schure al binario laterale del tavolo operatorio con un lato con lo sticker del logo rivolto verso l'alto
2. Inserire un palo con montatura circolare da 5/8" (1,6 cm) nella cavità per il montaggio
3. Assicurare il morsetto per fissare quella posizione girando la maniglia in senso orario

Scollegamento dal binario laterale

1. Scollegare il morsetto ruotando la maniglia in senso antiorario e rimuovere il palo di montaggio

SPECIFICHE GENERALI

Dimensioni del dispositivo (massime)

- Lunghezza: 3" +/- 0,5" (8 cm +/- 1 cm)
- Larghezza: 2" +/- 0,5" (5 cm +/- 1 cm)
- Spessore: 8" +/- 0,5" (20 cm +/- 1 cm) (maniglia del binario estesa)
- Peso del dispositivo: 1,5 +/- 0,5 libbre (0,68 kg +/- 0,22 kg)
- Si collega al binario del tavolo operatorio in qualsiasi punto del binario
- Installabile da una sola persona
- Ruotare il blocco/Allentare la maniglia
- Supporta gli accessori con pali di montaggio con diametro fino a 5/8" (1,6 cm)

PANORAMICA DEI COMPONENTI

Il Connettore Schure è un morsetto per tavolo operatorio adatto a tutti i tipi di binari. Serve a sostenere gli accessori della sala operatoria in posizione sopra al tavolo operatorio.

Vedere le dimensioni dei binari laterali di seguito.

USA: 0,374" x 1,122" (9,5 mm x 28,5 mm) PN# 800-0006

Denyer: 0,236" x 1,496" (6 mm x 38 mm) PN# 800-0006-DEN

Europa: 0,394" x 0,984" (10 mm x 25 mm) PN# 800-0006-EU

Eschmann (UK): 0,236" x 1,260" (6 mm x 32 mm) PN# 800-0006-UK

Giappone: 0,354" x 1,260" (9 mm x 32 mm) PN# 800-0006-JPN

Svizzera: 0,394" x 1,181" (10 mm x 30 mm) PN# 800-0006-SWISS

INFORMAZIONI GENERALI

- Prodotto non realizzato con lattice di gomma naturale
- Il dispositivo supporta 227 kg (500 libbre) di carico proporzionale del paziente (paziente alto 193 cm (6'4") per modello di corpo umano al 99%)
- La garanzia del prodotto copre il prodotto dai difetti di fabbricazione per un periodo di 2 anni
- Se danneggiato durante la spedizione, chiamare il Servizio Clienti al (888) 724-8763 o +1 (781) 982-7000 per ottenere il numero di autorizzazione al reso del materiale. Per problemi inerenti la garanzia del prodotto, contattare il Servizio Clienti.
- Dispositivo medico con marchio CE conforme a MDR (UE) 2017/745
- Il prodotto non richiede manutenzione; controllare le condizioni del prodotto prima del successivo utilizzo
- La vita utile del dispositivo è di 5 anni in condizioni di uso normale
- Conservare il dispositivo a una temperatura da -4°F a +86°F (da -20°C a 30°C)

DISPOSIZIONE

- Generale: prevenire l'infezione pulendo e disinfettando il prodotto prima dello smaltimento
- Imballaggio: smaltire il materiale di imballaggio tra i rifiuti domestici in base ai requisiti nazionali
- SchureMed accetta indietro i prodotti usati o ritirati o smaltisce il prodotto in conformità con i requisiti nazionali



AVVERTENZE PER L'UTILIZZO DEL PRODOTTO

AVVERTIMENTO!

Il carico massimo non deve superare la proporzione adeguata di un paziente che pesa 500 libbre. (227 chilogrammi). Nel caso dei tavoli chirurgici con capacità di carico massima ridotta, fare attenzione a non sovraccaricare le guide accessorie.



AVVERTIMENTO! Non riutilizzare il dispositivo se sono presenti evidenti segni di danni o problemi funzionali. Consultare il produttore prima di riutilizzarlo.

CONSIGLI PER LA PULIZIA

Seguire le attuali linee guida del giornale dell'Association of PeriOperative Registered Nurses per le corrette procedure di pulizia e disinfezione.

ATTENZIONE

Leggere/seguire rigorosamente le indicazioni del produttore per quanto riguarda i liquidi detergenti. NON utilizzare detergenti contenenti fenoli.

1. Rimuovere i principali contaminanti dall'accessorio con materiali usa e getta. Seguire le procedure appropriate per lo smaltimento dei rifiuti a rischio biologico.
2. Applicare abbondantemente il liquido detergente sull'intero accessorio e pulire con un panno pulito e privo di lanugine finché tutta l'umidità e il liquido detergente non vengono rimossi dall'accessorio
3. Lasciare asciugare l'accessorio

AVVISO PER L'UTENTE

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utente e/o il paziente.

Versioni lingue eIFU

Per scaricare e stampare le istruzioni per l'uso, visitare il sito www.schuremed.com

Glossario dei simboli

Simbolo	Nome
	Produttore
	Data di produzione
	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
	Rappresentante autorizzato in Svizzera
	Importatore
	Numero di serie
	Avvertenza
	Dispositivo medico
	Identificativo univoco del dispositivo
	Marcatura CE



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Numero verde (888) 724-8763 | Tel. (781) 982-7000 | Fax (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

