

Instructions d'utilisation

REF Étriers Candy Cane 800-0012

Pièce de rechange

Sangle de rechange pour étriers Candy Cane 790-0006

UTILISATION PRÉVUE

L'utilisation prévue consiste à maintenir les jambes du patient pendant une opération gynécologique, urologique ou laparoscopique courte ou longue. Les utilisateurs attendus de ce dispositif sont les professionnels médicaux au sein des hôpitaux et des centres chirurgicaux.



INSTRUCTIONS

Familiarisez-vous avec les fonctionnalités du dispositif de positionnement du patient avant de l'utiliser. Entraînez-vous toujours sur un/une infirmier(ère), un médecin ou un volontaire approprié avant tout acte chirurgical.

Attacher les étriers à la table d'opération chirurgicale

1. Entrez la tige de montage des étriers Candy Cane dans la pince Schure Socket XL P/N 800-0134 (vendue séparément), et tournez la poignée de la pince Schure Socket XL dans le sens des aiguilles d'une montre pour la serrer.
2. Guidez la jambe du patient dans l'étrier pour cheville.

Régler les étriers

1. Les étriers Candy Cane en acier inoxydable se règlent verticalement de 71 à 112 cm avec un espace pour les jambes de 20 cm. Desserrez la poignée pour régler la position désirée.
2. Verrouillez la hauteur de l'étrier en faisant pivoter la poignée ergonomique.

Détacher l'étrier de la table

1. Faites pivoter la pince Schure Socket XL dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour détacher et enlever l'étrier de la pince.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Dimensions du dispositif (maximales)

- Longueur : 31,4 cm +/- 1 cm
- Largeur : 3,2 cm +/- 1 cm
- Profondeur/Hauteur : 91,7 cm +/- 1 cm
- Poids du dispositif par étrier : 2 +/- 0,22 kg (2 +/- .22 kg)
- S'attache aux rails latéraux d'une table d'opération chirurgicale

- Une seule personne nécessaire pour l'installation
- L'étrier est équipé d'une tige de montage (1,6 cm) qui se fixe avec la pince Schure Socket XL P/N 800-0134 (vendue séparément).
- Sangle pour cheville : 46 cm +/- 5 cm
- Sangle pour cheville de rechange P/N 790-0006 (vendue séparément à l'unité)

PRÉSENTATION DES COMPOSANTS

L'étrier Candy Cane est un accessoire pour table d'opération chirurgicale qui aide à positionner les jambes pour les opérations gynécologiques, urologiques ou laparoscopiques.

Pièce de rechange

Sangle pour étriers Candy Cane **790-0006**

Autre matériel nécessaire : Pince 800-0134 Schure Socket XL, 2 pinces (vendues séparément)

États-Unis : 9,5 mm x 28,5 mm PN# 800-0134

Denyer : 6 mm x 38 mm PN# 800-0134-DEN

Europe : 10 mm x 25 mm PN# 800-0134-EU

Eschmann (UK) : 6 mm x 32 mm PN# 800-0134-UK

Japon : 9 mm x 32 mm PN# 800-0134-JPN

Suisse : 10 mm x 30 mm PN# 800-0134-SWISS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Ce produit n'est pas fabriqué en latex naturel.
- Le dispositif supporte un poids patient de 159 kg (pour un patient mesurant 193 cm soit 99 % des cas).
- La garantie produit couvre les défauts de fabrication du produit pour une période de 2 ans.
- En cas de dommages pendant l'expédition, veuillez appeler le Service client au (888) 724-8763 ou au (781) 982-7000 pour obtenir un numéro d'autorisation de renvoi du matériel. Pour les problèmes de garantie produit, contactez le Service client.
- Dispositif médical avec marquage CE selon le règlement (UE) 2017/45.
- Le produit ne nécessite aucune maintenance. Vérifiez l'état du produit avant chaque utilisation.
- La durée de vie du produit est de 5 ans dans des conditions d'utilisation normale.
- Stockez le dispositif entre -20 °C et 30 °C.

MISE AU REBUT

- **Généralités** - Évitez les infections en nettoyant et en désinfectant le produit avant sa mise au rebut.
- **Emballage** - Mettez le matériau d'emballage au rebut avec les déchets ménagers conformément aux réglementations nationales.
- SchureMed accepte de reprendre les produits usagés et obsolètes ou la mise au rebut du produit conformément aux réglementations nationales.



AVERTISSEMENTS D'UTILISATION DU PRODUIT

AVERTISSEMENT !

La charge maximale ne doit pas dépasser la proportion appropriée d'un patient pesant 159 kg. (159 kg). Lors de l'utilisation de tables d'opération chirurgicale avec une charge maximale, vérifiez bien que les rails pour accessoire ne sont pas surchargés.



AVERTISSEMENT !

Danger provenant d'une mauvaise utilisation. Suivez strictement les instructions d'utilisation de votre système de table d'opération chirurgicale.



***AVERTISSEMENT !** Ne réutilisez pas le dispositif s'il présente des signes évidents de dommage ou de dysfonctionnements. Consultez un fabricant avant toute réutilisation.*



AVERTISSEMENT !

La capacité de charge de la table d'opération chirurgicale peut être inférieure. Ne surchargez jamais la table d'opération chirurgicale. Le dispositif est conçu uniquement pour être monté sur le côté du rail de la table d'opération chirurgicale.

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE

Suivez les instructions du journal de l'association américaine des infirmier(e)s de bloc opératoire (AORN) pour connaître la procédure de nettoyage et de désinfection appropriée.



AVERTISSEMENT !

Respectez les normes en matière de pathogènes transmissibles par le sang de l'Occupational Safety and Health Administration. Utilisez les vêtements, gants, masques et protections oculaires recommandés pour nettoyer l'accessoire.

ATTENTION

Lisez/suivez attentivement les instructions du fabricant en matière de liquides de nettoyage. NE PAS utiliser de nettoyants contenant des composés phénoliques.

- 1. Éliminez tous les contaminants principaux de l'accessoire à l'aide de matériaux jetables. Suivez les procédures appropriées de mise au rebut des déchets médicaux.*
- 2. Appliquez une quantité abondante de liquide de nettoyage sur l'accessoire entier et nettoyez avec un chiffon propre non pelucheux jusqu'à ce que la moisissure et le liquide de nettoyage soit entièrement*

éliminés de l'accessoire.
3. *Laissez sécher l'accessoire.*

NOTICE D'UTILISATION

Tout incident grave ayant eu lieu en rapport avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient se trouve.

Versions de langue eIFU

Pour télécharger et imprimer les instructions d'utilisation, veuillez accéder à www.schuremed.com

Glossaire des symboles

Symbole	Titre
	Fabriquant
	Date de fabrication
	Représentant agréé dans l'Union européenne
	Représentant agréé en Suisse
	Importateur
	Numéro de série
	Mise en garde
	Dispositif médical
	Identificateur unique du dispositif
	Marquage CE



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Numéro gratuit (888) 724-8763 | Ph (781) 982-7000 | Fax (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

