

Istruzioni per l'uso

REF Staffe ricurve 800-0012

Pezzo di ricambio

Cinghia di ricambio per staffe uncinata 790-0006

USO PREVISTO

Le staffe sono pensate per trattenere le gambe del paziente durante interventi ginecologici, urologici o laparoscopici di breve o lunga durata. Gli utilizzatori destinatari di questo dispositivo sono i professionisti del settore medico all'interno di ospedali e centri chirurgici.



ISTRUZIONI

Prima di utilizzarlo nelle operazioni, acquisire familiarità con le caratteristiche del dispositivo di posizionamento del paziente. Fare sempre pratica con infermieri, medici o volontari prima dell'uso clinico.

Fissaggio delle staffe al tavolo operatorio

1. Fissare il montante della staffa ricurva all'attacco Schure XL P/N 800-0134 (venduto separatamente), ruotando l'impugnatura dell'attacco Schure XL in senso orario per serrare.
2. Guidare la gamba del paziente nella staffa per la caviglia

Regolazione della staffa

1. Le staffe ricurve in acciaio inossidabile sono regolabili verticalmente da 71 a 112 cm con uno spazio per le gambe di 20 cm. Allentare l'impugnatura per impostare la posizione desiderata.
2. Bloccare il livello della staffa ruotando l'impugnatura ergonomica

Rimozione della staffa dal tavolo

1. Ruotare l'impugnatura dell'attacco Schure XL in senso antiorario per allentare e rimuovere la staffa dall'attacco

SPECIFICHE GENERALI

Dimensioni del dispositivo (massime)

- Lunghezza: 31,4 +/- 1 cm
- Larghezza: 3,2 +/- 1 cm
- Profondità/Altezza: 91,7 +/- 1 cm
- Peso del dispositivo per staffa: 2 +/- 0,22 kg (4,4 +/- 0,5 libbre)
- Si collega alle guide laterali del tavolo operatorio
- Per il montaggio basta una sola persona
- La staffa è dotata di un montante di 1,6 cm collegabile all'attacco Schure XL P/N 800-0134

(venduto separatamente)

- *Cinghia per la caviglia: 46 L +/- 5 cm L (18" L x 2" L)*
- *Cinghia di ricambio per la caviglia P/N 790-0006 (in vendita separatamente come pezzo unico)*

PANORAMICA DEI COMPONENTI

La staffa ricurva è un accessorio per tavoli operatori che aiuta a posizionare le gambe per interventi ginecologici, urologici o laparoscopici.

Pezzo di ricambio

Cinghia per staffa ricurva **790-0006**

Altri prodotti necessari: Attacco Schure XL 800-0134, 2 pezzi (venduti separatamente)

USA: 9,5 x 28,5 mm PN# 800-0134

Denyer: 6 x 38 mm PN# 800-0134-DEN

Europa: 10 x 25 mm PN# 800-0134-EU

Eschmann (Regno Unito): 6 x 32 mm PN# 800-0134-UK

Giappone: 9 x 32 mm PN# 800-0134-JPN

Svizzera: 10 x 30 mm PN# 800-0134-SWISS

INFORMAZIONI GENERALI

- *Prodotto non realizzato in lattice di gomma naturale*
- *Il dispositivo supporta un carico proporzionale di 159 kg (paziente alto 193 cm secondo il modello del corpo umano al 99%)*
- *La garanzia del prodotto copre i difetti di fabbricazione per un periodo di due anni*
- *Se il prodotto è stato danneggiato durante la spedizione, chiamare il Servizio clienti al numero (888) 724-8763 o (781) 982-7000 per ottenere il codice di autorizzazione al reso. In caso di problemi con la garanzia del prodotto, contattare il Servizio clienti.*
- *Dispositivo medico con marchio CE conforme all'RDM (UE) 2017/745*
- *Il prodotto non richiede manutenzione, verificarne le condizioni prima di un nuovo utilizzo*
- *In condizioni di utilizzo normale, la durata del dispositivo è di cinque anni*
- *Conservare il dispositivo tra -20 e 30 °C*

SMALTIMENTO

- **Note generali** - *Prevenire le infezioni pulendo e disinfettando il prodotto prima di smaltirlo*
- **Imballaggio** - *Smaltire il materiale di imballaggio insieme ai rifiuti domestici in conformità alle norme nazionali*
- *SchureMed recupera i prodotti usati o ritirati e li smaltisce in conformità alle norme nazionali*



AVVERTENZE SULL'USO DEL PRODOTTO

ATTENZIONE!

Il carico massimo non deve superare la proporzione relativa a un paziente di 159 kg. In caso di tavoli operatori a bassa capacità di carico massimo, prestare attenzione a non sovraccaricare le guide per accessori.



ATTENZIONE!

Pericolo derivante da un utilizzo errato. Seguire scrupolosamente le istruzioni per l'uso del sistema del proprio tavolo operatorio.



ATTENZIONE! *Non riutilizzare il dispositivo in caso di danni evidenti o problemi di funzionamento. Prima del riutilizzo, consultare il produttore.*



ATTENZIONE!

Le capacità di carico dei tavoli operatori possono essere inferiori. Non sovraccaricare mai il tavolo operatorio. Il dispositivo deve essere montato solo sul lato della guida del tavolo operatorio.

RACCOMANDAZIONI PER LA PULIZIA

Seguire le attuali linee guida dell'Association of periOperative Registered Nurses Journal per una corretta procedura di pulizia e disinfezione.



ATTENZIONE!

Rispettare le norme per gli agenti patogeni a trasmissione ematica dell'Occupational Safety and Health Administration. Per la pulizia degli accessori, utilizzare indumenti, guanti, maschere e occhiali protettivi raccomandati.

AVVISO

Leggere e seguire scrupolosamente le indicazioni del produttore per i liquidi detergenti. NON utilizzare detergenti contenenti fenoli.

- 1. Rimuovere i principali contaminanti dall'accessorio con materiali monouso. Seguire le procedure appropriate per lo smaltimento dei rifiuti a rischio biologico.*
- 2. Applicare abbondantemente il liquido detergente su tutto l'accessorio e strofinare con un panno pulito e privo di lanugine fino a rimuovere tutta l'umidità e il detergente dall'accessorio*
- 3. Lasciare asciugare l'accessorio*

PREAVVISO ALL'UTILIZZATORE

Eventuali incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

Versioni linguistiche delle istruzioni elettroniche per l'uso

Per scaricare e stampare le istruzioni per l'uso, visitare www.schuremed.com

Glossario dei simboli

Simbolo	Nome
	Produttore
	Data di produzione
	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
	Rappresentante autorizzato in Svizzera
	Importatore
	Numero di serie
	Avvertenza
	Dispositivo medico
	Identificativo univoco del dispositivo
	Marcatura CE



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Numero verde (888) 724-8763 | **Tel.** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

