

Gebrauchsanweisung

REF Lithotomie Halteschlaufen 800-0049

Ersatz-Pads

Platin Halteschlaufe Schuh pads 508-1415

VERWENDUNGSZWECK

Der Verwendungszweck ist das Halten der Beine des Patienten während kurzer oder langer gynäkologischer, urologischer oder laparoskopischer Eingriffe. Die Zielgruppe für dieses Gerät sind medizinische Fachkräfte in Krankenhäusern und Operationszentren.



ANLEITUNGEN

Machen Sie sich mit den Funktionen des Patientenlagerungsgeräts vertraut, bevor Sie es an einem Patienten verwenden. Üben Sie die Anwendung immer an einer Krankenschwester, einem Arzt oder einem geeigneten Freiwilligen, bevor Sie es klinisch einsetzen.

Befestigen der Halteschlaufen am Operationstisch

1. Befestigen Sie die Schure Sockelklammern (*separat erhältlich*) an den Seitenschienen des Tisches.
2. Setzen Sie die Befestigungsposten der Halteschlaufe in die Klemmen ein. Drehen Sie den Griff des Schure Socket im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.
3. Führen Sie die Beine des Patienten in die Schuhe und befestigen Sie diese mit Schlaufen- und Hakenbändern.

Einstellen der Halteschlaufen

1. Drehen Sie die Griffe der Schuhblöcke gegen den Uhrzeigersinn, um die Schuhblöcke zu lösen. Stellen Sie die gewünschte Position nach oben oder unten ein. Drehen Sie den Griff des Schuhblocks im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

Abnehmen der Halteschlaufen vom Tisch

1. Drehen Sie den Griff der Halteschlaufe gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen, und ziehen Sie die Halteschlaufe aus der Fassung.

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Geräteabmessungen (Maximum)

- Länge: 29.5" +/- 0.5" (75 cm +/- 1 cm)

- *Breite: 10,3" +/- 0,5" (26 cm +/- 1 cm)*
- *Tiefe/Höhe: 21" +/- 0,5" (53,3 cm +/- 1 cm) (mit Pad)*
- *Gerätengewicht pro Halteschlaufe: 7,7 +/- 0,5 Pfund (3,5 +/- 0,22 kg)*
- *Wird an der Schiene des Operationstisches an jeder beliebigen Stelle der Schiene befestigt*
- *Ein-Personen-Installation*
- *Druckauslöser*

KOMPONENTENÜBERSICHT

Lithotomie Halteschlaufen sind ein Zubehör für den OP-Tisch, das die Positionierung der Beine bei gynäkologischen, urologischen oder laparoskopischen Eingriffen erleichtert.

Ersatz-Pads

508-1415 Platin Halteschlaufe Schuh pads, Set

Andere für die Verwendung erforderliche Produkte:

800-0006 Schure Sockel, 2 Stück (separat erhältlich)

- *US: 0,374" x 1,122" (9,5 mm x 28,5 mm) PN# 800-0006*
- *Denyer: 0,236" x 1,496" (6 mm x 38 mm) PN# 800-0006-DEN*
- *Europa: 0,394" x 0,984" (10 mm x 25 mm) PN# 800-0006-EU*
- *Eschmann (UK): 0,236" x 1,260" (6 mm x 32 mm) PN# 800-0006-UK*
- *Japan: 0,354" x 1,260" (9 mm x 32 mm) PN# 800-0006-JPN*
- *Schweiz: 0,394" x 1,181" (10 mm x 30 mm) PN# 800-0006-SWISS*

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- *Produkt nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt*
- *Das Gerät trägt 159 kg (350 Pfund) anteilige Patientenlast (193 cm (6'4") großer Patient nach 99% menschlichem Körpermodell)*
- *Die Produktgarantie deckt Herstellungsfehler für einen Zeitraum von 2 Jahren ab*
- *Bei Transportschäden rufen Sie den Kundendienst unter (888) 724-8763 oder (781) 982-7000 an, um eine Rücksendegenehmigungsnummer zu erhalten. Bei Fragen zur Produktgarantie wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.*
- *CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt gemäß MDR (EU) 2017/745*
- *Das Produkt ist wartungsfrei, überprüfen Sie den Zustand des Produkts vor dem nächsten Gebrauch*
- *Die Lebensdauer des Geräts beträgt 5 Jahre bei normalem Gebrauch*
- *Lagern Sie das Gerät zwischen -4°F und +86°F (-20°C bis 30°C)*

ENTSORGUNG

- **Allgemein** - *Verhindern Sie Infektionen durch Reinigung und Desinfektion des Produkts vor der Entsorgung*
- **Verpackung**- *Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial über den Hausmüll gemäß den nationalen Vorschriften*
- *SchureMed nimmt gebrauchte oder ausgemusterte Produkte zurück - oder entsorgt das Produkt gemäß den nationalen Anforderungen*



WARNHINWEISE ZUR PRODUKTVERWENDUNG

WARNUNG!

Die maximale Belastung sollte den angemessenen Anteil eines Patienten mit einem Gewicht von 350 Pfund nicht überschreiten (159 kg). Achten Sie bei OP-Tischen mit niedriger maximaler Tragfähigkeit darauf, dass die Zubehörschienen nicht überlastet werden.



WARNUNG!

Gefahr bei unsachgemäßer Verwendung. Halten Sie sich strikt an die Gebrauchsanweisung für Ihr Operationstischsystem.



***WARNUNG!** Verwenden Sie das Gerät nicht wieder, wenn es offensichtliche Anzeichen von Schäden oder Funktionsstörungen aufweist. Wenden Sie sich vor der Wiederverwendung an den Hersteller.*



WARNUNG!

Die Tragfähigkeit des Operationstisches kann geringer sein. Überladen Sie niemals einen Operationstisch. Das Gerät ist nur für die Montage an der Seite der Schiene des Operationstisches vorgesehen.

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

Befolgen Sie die aktuellen Richtlinien der Association of periOperative Registered Nurses Journal für ordnungsgemäße Reinigungs- und Desinfektionsverfahren.



WARNUNG!

Halten Sie die Standards für durch Blut übertragbare Krankheitserreger der Occupational Safety and Health Administration ein. Verwenden Sie zur Reinigung des Zubehörs die empfohlene Schutzkleidung, Handschuhe, Masken und Augenschutz.

VORSICHT

Lesen und befolgen Sie unbedingt die Anweisungen des Herstellers für Reinigungsflüssigkeiten. Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel, die Phenole enthalten.

1. Entfernen Sie größere Verunreinigungen aus dem Zubehör mit Einwegmaterialien. Befolgen Sie die entsprechenden Verfahren zur Entsorgung von Bioabfall.

2. Tragen Sie die Reinigungsflüssigkeit großzügig auf das gesamte Zubehör auf und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch ab, bis alle Feuchtigkeit und Reinigungsflüssigkeit vom Zubehör entfernt ist
3. Zubehör trocknen lassen

BENUTZERHINWEIS

Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

eIFU Sprachversionen

Um die Gebrauchsanweisung herunterzuladen und auszudrucken, gehen Sie bitte zu www.schuremed.com

Symbol-Glossar

| Symbol | Titel |
|---|---|
|  | Hersteller |
|  | Herstellungsdatum |
|  | Bevollmächtigter Vertreter in der EU |
|  | Bevollmächtigter Vertreter in der Schweiz |
|  | Importeur |
|  | Seriennummer |
|  | Warnhinweis |
|  | Medizinprodukt |
|  | Unique Device Identifier |
|  | CE-Kennzeichnung |



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Gebührenfrei (888) 724-8763 | **Ph** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

