

Gebrauchsanweisung

REF Patient Restraint Strap, 96 "L 800-0057

REF Bariatric Restraint Straps with Pad
800-0119

Zubehör (separat erhältlich)
Restraint Strap Mounting Hook 512-0039

VERWENDUNGSZWECK

Der Verwendungszweck ist die Stabilisierung der Patientenpositionierung auf dem Operationstisch für verschiedene chirurgische Verfahren. Das Produkt ist für medizinisches Fachpersonal in Krankenhäusern und Operationszentren bestimmt.

ANWEISUNGEN

Machen Sie sich mit den Funktionen des Produkts zur Patientenlagerung vertraut, bevor Sie es an einem Patienten anwenden. Üben Sie die Verwendung immer an einer Pflegekraft, einem Arzt oder einem geeigneten Freiwilligen, bevor Sie das Produkt klinisch einsetzen.

Anbringung und Einrichtung

1. Legen Sie ein Polster auf die Bauchregion des Patienten.
2. Legen Sie den/die Gurt(e) über das Polster und befestigen Sie sie an den seitlichen Schienen des OP-Tisches. Wickeln Sie den/die Gurt(e) dazu entweder um die Schienen oder verwenden Sie Befestigungshaken (separat erhältlich).
3. Führen Sie bei der Verwendung von Befestigungshaken den/die Gurt(e) einfach durch den/die Haken hindurch.
4. Heben Sie zum Justieren und Feststellen die Schnallen an und ziehen Sie die Gurte fest.

Anweisungen zum Entfernen

1. Lösen Sie die Gurte durch Anheben der Schnallen und Entfernen der Haken (falls verwendet).



ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Produktabmessungen (Maximalwerte)

| | 800-0057 | 800-0119 |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Gurtlänge | 243,8 cm +/- 1 cm (96" +/- 0,5") | 353 cm +/- 1 cm (132" +/- 0,5") |
| Gurtbreite | 5,1 cm +/- 1 cm (2" +/- 0,5") | 5,1 cm +/- 1 cm (2" +/- 0,5") |
| Polsterlänge | 46,7 cm +/- 1 cm (18" +/- 0,5") | 76,2 cm +/- 1 cm (30" +/- 0,5") |
| Polsterbreite | 12,7 cm +/- 1 cm (5" +/- 0,5") | 30,5 cm +/- 1 cm (12" +/- 0,5") |
| Gerätegewicht | 1 +/- 0,22 kg (1,8 +/- 0,5 Pfund.) | 2,5 +/- 0,22 kg (5,5 +/- 0,5 Pfund.) |

KOMPONENTEN-ÜBERSICHT

Restraint Straps sind ein Zubehör für den Operationstisch zur Stabilisierung der Patientenpositionierung auf dem Operationstisch für verschiedene chirurgische Verfahren.

Zubehör (separat erhältlich)

Restraint Strap Mounting Hook 512-0039

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Das Produkt enthält keinen Naturkautschuklatex.
- Die Produktgarantie deckt Herstellungsfehler für 2 Jahre.
- Bei Transportschäden rufen Sie bitte den Kundendienst unter (888) 724-8763 oder (781) 982-7000 an, um eine Rücksendegenehmigungsnummer zu erhalten. Bei Fragen zur Produktgarantie wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt gemäß MDR (EU) 2017/745
- Das Produkt ist wartungsfrei, überprüfen Sie den Zustand des Produkts vor dem nächsten Gebrauch.
- Die Lebensdauer des Geräts beträgt 5 Jahre bei normalem Gebrauch.
- Produkt zwischen -20°C und 30°C (-4°F bis +86°F) lagern
- Reinigen Sie mit einem für Krankenhäuser geeigneten Desinfektionsmittel

ENTSORGUNG

- **Allgemeines** – Verhindern Sie Infektionen durch Reinigung und Desinfektion des Produkts vor der Entsorgung.
- **Verpackung** – Entsorgen Sie die Verpackung im Hausmüll gemäß den nationalen Vorschriften.
- SchureMed nimmt gebrauchte oder ausgediente Produkte zurück – oder entsorgen Sie das Produkt gemäß den nationalen Vorschriften.



WARNHINWEISE ZUM PRODUKTGEBRAUCH

WARNUNG!

Gefahren entstehen durch unsachgemäße Verwendung. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung für Ihr OP-Tisch-System.



WARNUNG!

Achten Sie beim Öffnen und Schließen der Gurtschnallen darauf, keine Haut einzuklemmen.



WARNUNG!

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es abgenutzt oder beschädigt ist oder wenn Teile fehlen.



WARNUNG! *Verwenden Sie das Gerät nicht wieder, wenn es offensichtliche Anzeichen von Schäden oder Funktionsstörungen aufweist. Wenden Sie sich vor der Wiederverwendung an den Hersteller.*

REINIGUNGSHINWEISE

Befolgen Sie die aktuellen Richtlinien des Association of periOperative Registered Nurses Journal für angemessene Reinigungs- und Desinfektionsverfahren.



WARNUNG!

Halten Sie sich an die Standards für durch Blut übertragbare Krankheitserreger der Occupational Safety and Health Administration. Verwenden Sie zur Reinigung des Zubehörs die empfohlene Schutzkleidung, Handschuhe, Masken und Augenschutz.

VORSICHT

Lesen und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers der Reinigungsflüssigkeit. Verwenden Sie KEINE phenolhaltigen Reiniger.

- 1. Entfernen Sie größere Verunreinigungen des Zubehörs mit Einwegmaterialien. Befolgen Sie die entsprechenden Verfahren zur Entsorgung von Bioabfall.*
- 2. Tragen Sie die Reinigungsflüssigkeit großzügig auf das gesamte Zubehör auf und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselreien Tuch ab, bis alle Feuchtigkeit und Reinigungsflüssigkeit vom Zubehör entfernt ist.*
- 3. Lassen Sie das Zubehör trocknen.*

BENUTZERHINWEIS

Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Produkt muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Benutzer und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

eIFU Sprachversionen

Um die Gebrauchsanweisung herunterzuladen und auszudrucken, gehen Sie auf www.schuremed.com

Symbol-Glossar

| Symbol | Titel |
|---|---|
|  | Hersteller |
|  | Herstellungsdatum |
|  | Bevollmächtigter Vertreter in der EU |
|  | Bevollmächtigter Vertreter in der Schweiz |
|  | Importeur |
|  | Seriennummer |
|  | Warnhinweis |
|  | Medizinprodukt |
|  | Unique Device Identifier |
|  | CE-Kennzeichnung |



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Gebührenfrei (888) 724-8763 | **Tel** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

