



Οδηγίες χρήσης

- REF** Table Width Extension, Μικρό
800-0081 28 cm x 20 cm
- REF** Table Width Extension, Μικρό (EU)
800-0081-EU 28 cm x 20 cm
- Ανταλλακτικό μαξιλάρι*
Table Width Extension Pad, Μικρό
508-0132 28 cm x 20 cm

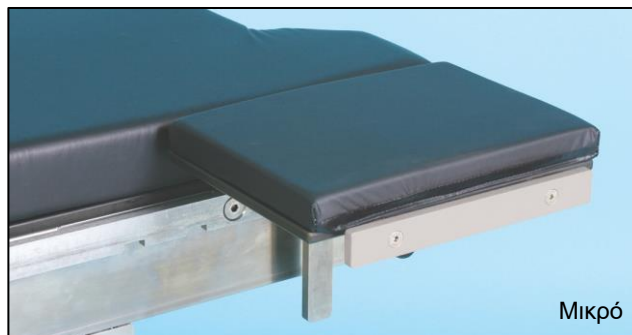

Μικρό

- REF** Table Width Extension, Μεσαίο
800-0079 38 cm x 20 cm
- REF** Table Width Extension, Μεσαίο (EU)
800-0079-EU 38 cm x 20 cm
- Ανταλλακτικό μαξιλάρι*
Table Width Extension Pad, Μεσαίο
508-0114 38 cm x 20 cm

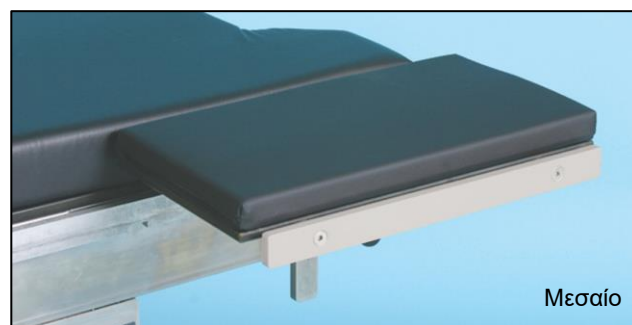

Μεσαίο

- REF** Table Width Extension, Μεγάλο
800-0077 51 cm x 10 cm
- REF** Table Width Extension, Μεγάλο (EU)
800-0077-EU 51 cm x 10 cm
- Ανταλλακτικό μαξιλάρι*
Table Width Extension Pad, Μεγάλο
508-0075 51 cm x 10 cm



Μεγάλο

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η προβλεπόμενη χρήση είναι η επέκταση του πλάτους της χειρουργικής κλίνης. Ενδεδειγμένοι χρήστες της διάταξης αυτής είναι οι επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου, σε νοσοκομεία και κλινικές.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες της συσκευής για την τοποθέτηση των ασθενών πριν τη χρησιμοποίησετε σε ασθενείς. Να δοκιμάζεται πάντα σε νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρό ή κατάλληλο εθελοντή πριν από την κλινική χρήση.

Προσάρτηση στη χειρουργική κλίνη

1. Προσαρτήστε τον απλό σφιγκτήρα P/N 800-0228 (πωλείται ξεχωριστά) στο πλαϊνό κιγκλίδωμα
2. Προσθέστε τον πόλο ανύψωσης στον σφιγκτήρα
3. Στρέψτε τη λαβή δεξιόστροφα για να στερεώσετε γερά τον σφιγκτήρα.

Αφαίρεση από τη χειρουργική κλίνη

1. Στρέψτε τη λαβή του σφιγκτήρα αριστερόστροφα για να ξεσφίξετε
2. Αφαίρεση από τον σφιγκτήρα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις συσκευής (μέγιστες)

Μικρό	Μεσαίο	Μεγάλο
800-0081 & 800-0081-EU - Μήκος: 28 cm +/- 1 cm (11" +/- 0.5") - Πλάτος: 20 cm +/- 1 cm (8" +/- 0.5") - Βάθος: 20 cm +/- 1 cm (με το προσκέφαλο) (8" +/- 0.5") - Βάρος συσκευής: 1.8 kg +/- .22 kg (4 lbs. +/- 0.5 lbs.) - Η εγκατάσταση να γίνεται από ένα άτομο	800-0079 & 800-0079-EU - Μήκος: 38 cm +/- 1 cm (15" +/- 0.5") - Πλάτος: 20 cm +/- 1 cm (8" +/- 0.5") - Βάθος: 20 cm +/- 1 cm (με το προσκέφαλο) (8" +/- 0.5") - Βάρος συσκευής: 1.8 kg +/- .22 kg (4 lbs. +/- 0.5 lbs.) - Η εγκατάσταση να γίνεται από ένα άτομο	800-0077 & 800-0077-EU - Μήκος: 51 cm +/- 1 cm (20" +/- 0.5") - Πλάτος: 10 cm +/- 1 cm (4" +/- 0.5") - Βάθος: 20 cm +/- 1 cm (με το προσκέφαλο) (8" +/- 0.5") - Βάρος συσκευής: 2 kg +/- .22 kg (4.5 lbs. +/- 0.5 lbs.) - Η εγκατάσταση να γίνεται από ένα άτομο

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Οι επεκτάσεις πλάτους κλίνης είναι επεκτάσεις χειρουργικής κλίνης που προσαρτώνται στα πλαϊνά κιγκλιδώματα των χειρουργικών κλινών.

Ανταλλακτικά μαξιλάρια

508-0132	Table Width Extension Pad, Μικρό	28 cm x 20 cm
508-0114	Table Width Extension Pad, Μεσαίο	38 cm x 20 cm
508-0075	Table Width Extension Pad, Μεγάλο	51 cm x 10 cm

Άλλα απαιτούμενα προϊόντα για χρήση:

800-0228 Απλός σφινγκήρας (πωλείται ξεχωριστά)

ΗΠΑ: 9.5 mm x 28.5 mm (0.374" x 1.122") PN# 800-0228

Denyer: 6 mm x 38 mm (0.236" x 1.496") PN# 800-0228-DEN

Ευρώπη: 10 mm x 25 mm (0.394" x 0.984") PN# 800-0228-EU

Eschmann (Ηνωμένο Βασίλειο): 6 mm x 32 mm (0.236" x 1.260") PN# 800-0228-UK

Ιαπωνία: 9 mm x 32 mm (0.354" x 1.260") PN# 800-0228-JPN

Ελβετία: 10 mm x 30 mm (0.394" x 1.181") PN# 800-0228-SWISS

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το προϊόν δεν έχει κατασκευαστεί με Λατέξ από φυσικό καουτσούκ
- Η συσκευή υποστηρίζει 227 kg αναλογία βάρους ασθενούς 193 cm ύψος ασθενούς ανά 99% μοντέλο ανθρώπινου σώματος
- Η εγγύηση του προϊόντος καλύπτει το προϊόν από κατασκευαστικά ελαττώματα για 2 έτη
- Αν προκληθεί βλάβη κατά την αποστολή, καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών στο τηλέφωνο (888) 724-8763 ή (781) 982-7000 για να σας παράσχουν με τον αριθμό εξουσιοδότησης επιστροφής υλικού. Για ζητήματα περί εγγύησης προϊόντος, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
- Ιατρική συσκευή με σήμανση CE σύμφωνα με τον κανονισμό MDR 2017/745/EE
- Δεν συμπεριλαμβάνετε η συντήρηση του προϊόντος, ελέγξτε την κατάσταση του προϊόντος πριν την επόμενη χρήση
- Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 5 έτη υπό κανονικές συνθήκες χρήσης
- Η συσκευή να φυλάσσεται σε θερμοκρασίες μεταξύ -20°C έως 30°C

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

- **Γενικά** - Αποφύγετε τη μόλυνση με τον καθαρισμό και την απολύμανση του προϊόντος πριν από την απόρριψη
- **Συσκευασία** - Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας μέσω οικιακών απορριμμάτων σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις
- Η SchureMed δέχεται χρησιμοποιημένα προϊόντα ή προϊόντα μετά τη λήξη διάρκειας ζωής τους - ή απόρριψη προϊόντων σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το μέγιστο φορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις κατάλληλες αναλογίας βάρους του ασθενή, δηλαδή τα 227 kg. Να χρησιμοποιείτε προσεχτικά με χειρουργικές κλίνες ελάχιστης-μέγιστης αναλογίας βάρους στα οποία τα πρόσθετα κιγκλιδώματα δεν είναι υπερφορτωμένα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην επαναχρησιμοποιείτε τη διάταξη εάν υπάρχουν εμφανή σημάδια φθοράς ή λειτουργικά θέματα. Συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή πριν από την επαναχρησιμοποίηση.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Οι κίνδυνοι προκύπτουν από λάθος χρήση. Να ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης με το σύστημα χειρουργικής κλίνης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Ακολουθήστε τις τρέχουσες οδηγίες του *Association of periOperative Registered Nurses Journal* για σωστές διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Να τηρείτε τα πρότυπα για τους παθογόνους παράγοντες που μεταδίδονται με το αίμα από τη Διοίκηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Να χρησιμοποιείτε τα προτεινόμενα προστατευτικά ρούχα, γάντια, μάσκες και προστατευτικό ματιών για τον καθορισμό του εξάρτηματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διαβάστε/Ακολουθήστε προσεχτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή για τον καθαρισμό υγρών. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα που περιλαμβάνουν φαινόλη.

1. Αφαιρέστε τους κύριους παράγοντες μόλυνσης από το εξάρτημα με αναλώσιμα υλικά. Ακολουθήστε τις κατάλληλες διεργασίες απόρριψης αποβλήτων βιολογικού κινδύνου.
2. Εφαρμόστε το υγρό καθαρισμού σε ολόκληρο το εξάρτημα και σκουπίστε με καθαρό πανί που δεν περιλαμβάνει χνούδια μέχρι να απομακρυνθεί όλη η υγρασία και το υγρό καθαρισμού από το εξάρτημα
3. Αφήστε το εξάρτημα να στεγνώσει

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Τυχόν σοβαρό συμβάν που έχει συμβεί σε σχέση με τη συσκευή πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή / και ο ασθενής.

Ξενογλώσσες Εκδόσεις eIFU

Για λήψη και εκτύπωση των Οδηγιών Χρήσης, μεταβείτε στη σελίδα www.schuremed.com

Γλωσσάριο Συμβόλων

Σύμβολο	Τίτλος
	Κατασκευαστής
	Ημερομηνία παραγωγής
	Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
	Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος στην Ελβετία
	Εισαγωγέας
	Σειριακός αριθμός
	Προειδοποίηση
	Ιατρική συσκευή
	Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής
	Σήμανση CE



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 ΗΠΑ

Χωρίς χρέωση (888) 724-8763 | **Τηλ.** (781) 982-7000 | **Φαξ** (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

