

Bruksanvisning

REF Table Width Extension, liten
800-0081 11"L x 8"W (28 cm x 20 cm)

REF Table Width Extension, liten (EU)
800-0081-EU 11"L x 8"W (28 cm x 20 cm)

Erstatningspute

Table Width Extension Pad, liten
508-0132 11"L x 8"W (28 cm x 20 cm)

REF Table Width Extension, medium
800-0079 15"L x 8"W (38 cm x 20 cm)

REF Table Width Extension, medium (EU)
800-0079-EU 15"L x 8"W (38 cm x 20 cm)

Erstatningspute


Table Width Extension Pad, medium
508-0114 15"L x 8"W (38 cm x 20 cm)

REF Table Width Extension, stor
800-0077 20"L x 4"W (51 cm x 10 cm)


REF Table Width Extension, stor (EU)
800-0077-EU 20"L x 4"W (51 cm x 10 cm)

Erstatningspute


Table Width Extension Pad, stor
508-0075 20"L x 4"W (51 cm x 10 cm)

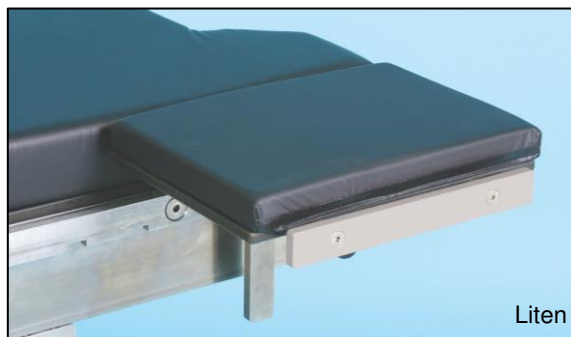

Liten

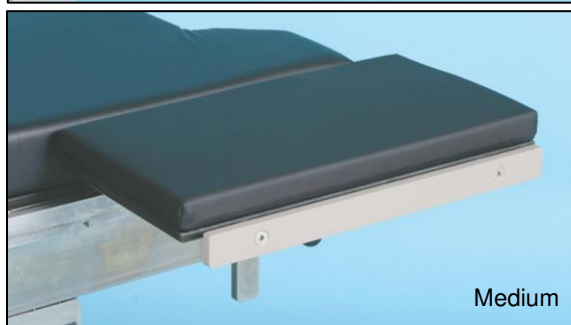

Medium

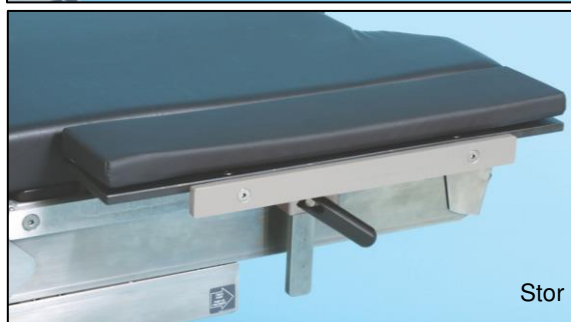

Stor

TILTENKT BRUK

Tiltenkt bruk er å utvide bredden på operasjonsbordet. De tiltenkte brukerne av denne enheten er medisinske fagpersoner på sykehus og kirurgisentre.

INSTRUKSJONER

Gjør deg kjent med egenskapene til pasientplasseringsenheten før du bruker den på pasienten. Øv deg alltid på en pleier, lege eller annen frivillig person før du benytter den klinisk.

Feste fotforlenger til operasjonsbordet

1. Fest Simple Clamp P/N 800-0228 (solgt separat) på sideskinnene
2. Sett monteringsstolpen inn i fatningen.
3. Drei håndtaket med klokken for å stramme fatningen.

Feste fotforlenger til operasjonsbordet

1. Snu klemmens håndtak mot klokken for å løsne

2. Ta enheten ut av fatningen.

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Enhetsens mål (maksimum)

Liten	Medium	Stor
800-0081 & 800-0081-EU • Lengde: 11" +/- 0,5" (28 cm +/- 1 cm) • Bredde: 8" +/- 0.5" (20 cm +/- 1 cm) • Dybde: 8" +/- 0.5" (with pad) (20 cm +/- 1 cm) • Enhetsens vekt: 4 lbs. +/- 0.5 lbs. (1,8 kg +/- 0,22 kg) • Installerer av én person	800-0079 & 800-0079-EU • Lengde: 15" +/- 0.5" (38 cm +/- 1 cm) • Bredde: 8" +/- 0.5" (20 cm +/- 1 cm) • Dybde: 8" +/- 0.5" (med innlegg) (20 cm +/- 1 cm) • Enhetsens vekt: 4 lbs. +/- 0.5 lbs. (1,8 kg +/- 0,22 kg) • Installerer av én person	800-0077 & 800-0077-EU • Lengde: 20" +/- 0.5" (51 cm +/- 1 cm) • Bredde: 4" +/- 0.5" (10 cm +/- 1 cm) • Dybde: 8" +/- 0.5" (med innlegg) (20 cm +/- 1 cm) • Enhetsens vekt: 4.5 lbs. +/- 0.5 lbs. (2 kg +/- 0,22 kg) • Installerer av én person

OVERSIKT OVER KOMPONENTER

BORDBREDDEUTVIDELSER er en operasjonsbordutvidelse som kan festes på sideskinnen for feste av ethvert bordtilbehør.

Erstatningsputer

508-0132 Table Width Extension Pad, Liten	11"L x 8"W (28 cm x 20 cm)
508-0114 Table Width Extension Pad, Medium	15"L x 8"W (38 cm x 20 cm)
508-0075 Table Width Extension Pad, Stor	20"L x 4"W (51 cm x 10 cm)

Andre nødvendige produkter for bruk:

800-0228 Simple Clamp (selges separat)

USA: 0.374" x 1.122" (9.5 mm x 28.5 mm) PN# 800-0228

Denyer: 0.236" x 1.496" (6 mm x 38 mm) PN# 800-0228-DEN

Europa: 0.394" x 0.984" (10 mm x 25 mm) PN# 800-0228-EU

Eschmann (Storbritannia): 0.236" x 1.260" (6 mm x 32 mm) PN# 800-0228-UK

Japan: 0.354" x 1.260" (9 mm x 32 mm) PN# 800-0228-JPN

Sveits: 0.394" x 1.181" (10 mm x 30 mm) PN# 800-0228-SWISS

GENERELL INFORMASJON

- Produktet er ikke laget av naturgummilatteks
- Enheten støtter 227 kg (227 kg) Denne enheten understøtter en proporsjonal pasientbelastning (6'4" (193 cm) høy pasient per 99 % kroppsmodell)
- Produktgarantien dekker produktet mot produksjonsfeil i en periode på 2 år.
- Hvis det har blitt skadet under forsendelse, kan du ringe kundeservicen på (888) 724-8763 eller (781) 982-7000 for å få et returnummer. Kontakt kundeservicen hvis du har spørsmål om produktgarantien.
- CE-merket medisinsk enhet i henhold til MDR (EU) 2017/745
- Produktet er vedlikeholdsfritt, kontroller tilstanden til produktet før neste gangs bruk
- Enheten har en levetid på 5 år ved normal bruk.

- Oppbevar enheten mellom -4 °F og +86 °F (-20 °C og +30 °C)

AVHENDING

- **Generelt** - Unngå infeksjon ved å vaske og desinfisere produktet før avhending
- **Forpakning** - Kast innpakningsmaterialet i husholdningsavfallet i henhold til nasjonale retningslinjer
- SchureMed tar i mot brukte og gamle produkter - eller kaster produktet i henhold til nasjonale retningslinjer



ADVARSLER KNYTTET TIL BRUK AV PRODUKTET

ADVARSEL! Maksimal belastning plassert på produktet på ikke overskride den aktuelle proporsjonen til en pasient som veier 227 kg. (227 kg). Bruk med forsiktighet ved lav-maksimal vekt slik at ikke operasjonsbordets skinner blir overbelastet.



ADVARSEL! Enheten må ikke gjenbrukes hvis det er klare tegn på skade eller funksjonsproblemer. Snakk med produsent før gjenbruk.



ADVARSEL!

Fare som følge av feil bruk. Følg instruksjonene nøye ved bruk sammen med ditt operasjonsbord system

ANBEFALINGER FOR RENGJØRING

Følg alltid gjeldende AORN-journalretningslinjer for å sikre riktig fremgangsmåte for rengjøring og desinfeksjon.



ADVARSEL!

Overhold standarder satt for håndtering av blodbårne patogener fra Statens Helsetilsyn. Bruk anbefalt verneutstyr, hansker, masker, og øyevern ved rengjøring av utstyr.

ADVARSEL

Les og følg produsentens instruksjoner for rengjøringprodukter nøye. IKKE BRUK rengjøringprodukter som inneholder fenoler.

1. Større urenheter fjernes fra utstyret med engangsmateriale. Følg passende prosedyre for fjerning av biologisk farlig avfall.
2. Påhør rikelig med rengjøringsmiddel på utstyret, tørk av med en ren løfri klut til all fuktighet og rengjøringsmiddel er fjernet fra utstyret
3. La utstyret tørke

BRUKERVARSEL

Enhver alvorlig hendelse som har skjedd i forbindelse med enheten, skal rapporteres til produsenten og vedkommende myndighet i medlemsstaten der brukeren og / eller pasienten er etablert.

eIFU språkversjoner

For å laste ned og skrive ut bruksanvisningen, gå til www.schuremed.com

Symbolliste

Symbol	Tittel
	Produsent
	Produksjonsdato
	Autorisert representant i Det europeiske fellesskap
	Autorisert representant i Sveits
	Importør
	Serienummer
	Advarsel
	Medisinsk enhet
	Unik enhetsidentifikator
	CE-merking



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Gratisnummer (888) 724-8763 | **Tlf** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | **orders@schuremed.com**

