

Instrucțiuni de utilizare

REF Disposable Face Masks 800-0164

UTILIZAREA PREVĂZUTĂ

Utilizarea prevăzută este de a ține capul pacientului în timpul procedurii operaționale. Utilizatorii țintă ai acestui dispozitiv sunt reprezentați de cadrele medicale din spitale și centrele de chirurgie.

INSTRUCȚIUNI

Familiarizați-vă cu funcțiile dispozitivului de poziționare a pacientului înainte de utilizare pe pacient. Întotdeauna încercați dispozitivul pe o asistentă medicală, medic sau un voluntar adecvat înainte de utilizarea clinică.

1. Așezați pacientul pe o masă chirurgicală/scaun cu spătar în poziție supină
2. După incubarea pacientului, țineți capul/gâtul pacientului și ridicați în sus scaunul cu spătar astfel încât pacientul să se afle în poziție Fowler (așezat)
3. Slăbiți articulația sferică și ajustați poziționatorul de cap în jurul capului pacientului. Asigurați-vă că urechile pacientului sunt neacoperite. Apoi strângeți articulația sferică.
4. Ținând clapele poziționatorului de cap alături de capul pacientului, plasați masca facială pe față așa cum este ilustrat asigurându-vă că ochii, nasul și gura sunt neacoperite
5. Atașați curelele velcro de sus și de jos ale măștii pe o parte la poziționatorul de cap. Apoi atașați cealaltă parte asigurându-vă că masca facială este centrată pe față.

NOTĂ: Capul trebuie să fie poziționat în condiții de siguranță. Dacă este nevoie, strângeți un pic curelele.

SPECIFICAȚII GENERALE

Dimensiunile (maxime) ale dispozitivului

- Lungime: **Curea:** 29" +/- 0,5" (74 cm +/- 1 cm), **Masca facială:** 9" +/- 0,5" (23 cm +/- 1 cm)
- Lățime: 13,5" +/- 0,5" (34 cm +/- 1 cm)
- Profunzime: 1" +/- 0,5" (2,5 cm +/- 1 cm)
- Greutate dispozitivului: 0,25 +/- 0,5 lbs. (0,11 +/- 0,22 kg)
- Se fixează la secțiunea capului a scaunelor cu spătar SchureMed
- Instalare pentru o persoană

PREZENTARE GENERALĂ A DISPOZITIVULUI

Masca facială de unică folosință ține ferm capul pacientului în timpul procedurii operaționale. Curelele



sunt moi și flexibile pentru a fi atașate la cadrul capului.

INFORMAȚII GENERALE

- *Produsul nu este fabricat cu latex de cauciuc natural*
- *În cazul în care a fost deteriorat în timpul expedierii, contactați Serviciul clienți apelând (888) 724-8763 sau (781) 982-7000 pentru a obține numărul de autorizare a returnării materialului. Pentru eliberarea garanției, contactați Serviciul clienți.*
- *Dispozitiv medical marcat CE în conformitate cu MDR (UE) 2017/745*
- *Păstrați dispozitivul în intervalul de temperatură: de la -4°F la +86°F (de la -20°C la 30°C)*



UTILIZARE PENTRU UN SINGUR PACIENT — Vă rugăm să eliminați dispozitivul după o singură folosire

AVIZ PENTRU UTILIZATOR

Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente din Statul Membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

Versiunile lingvistice eIFU

Pentru a descărca și imprima Instrucțiunile de utilizare, vă rugăm să accesați www.schuremed.com

Glosar de simboluri

Simbol	Titlu
	Producător
	Data fabricației
	Reprezentantul autorizat din Comunitatea Europeană
	Reprezentant autorizat în Elveția
	Importator
	Numărul de catalog sau de articol
	Numărul de serie
	Atenție
	Dispozitiv medical
	Identificatorul unic al dispozitivului
	Marcaj CE
	Utilizare pentru un singur pacient



SchureMed (081001460)

Strada Randolph nr. 452, Abington, MA 02351 SUA

Număr gratuit (888) 724-8763 | **Tel.** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

