

Gebrauchsanweisung

REF Pädiatrische Lithotomie
Halteschlaufen - PUPS 800-0233

REF Pädiatrische Lithotomie
Halteschlaufen - KIDS 800-0234

Ersatz-Pads

PUPS Schuhpads 508-295

KIDS Schuhpads 508-1296

VERWENDUNGSZWECK

Der Verwendungszweck ist das Halten der Beine des Patienten während kurzer oder langer gynäkologischer, urologischer und laparoskopischer Eingriffe. Die Zielgruppe für dieses Gerät sind medizinisches Fachpersonal in Krankenhäusern und Operationszentren.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Produkt nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt
- Das Gerät trägt 159 kg (350 Pfund) anteilige Patientenlast (193 cm (6'4") großer Patient nach 99% menschlichem Körpermmodell)
- Die Produktgarantie deckt Herstellungsfehler für einen Zeitraum von 2 Jahren ab
- Bei Transportschäden rufen Sie den Kundendienst unter (888) 724-8763 oder (781) 982-7000 an, um eine Rücksendegenehmigungsnummer zu erhalten. Bei Fragen zur Produktgarantie wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt gemäß MDR (EU) 2017/745
- Das Produkt ist wartungsfrei, überprüfen Sie den Zustand des Produkts vor dem nächsten Gebrauch
- Die Lebensdauer des Geräts beträgt 5 Jahre bei normalem Gebrauch
- Lagern Sie das Gerät zwischen -4°F und +86°F (-20°C bis 30°C)

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Geräteabmessungen (Maximum)

- Länge: 29.5" +/- 0.5" (75 cm +/- 1 cm)
- Breite: 10,3" +/- 0,5" (26 cm +/- 1 cm)
- Tiefe/Höhe: 21" +/- 0.5" (53,3 cm +/- 1 cm) (mit Pad)
- Gerätegewicht pro Halteschlaufe:
 - 800-0233: 5,1 +/- 0,5 Pfund (2,3 +/- 0,22 kg)
 - 800-0234: 5,35 +/- 0,5 Pfund (2,4 +/- 0,22 kg)
- Kann an jeder beliebigen Stelle der Schiene am OP-Tisch befestigt werden
- Ein-Personen-Installation

ANLEITUNGEN

Machen Sie sich mit den Funktionen des Patientenlagerungsgeräts vertraut, bevor Sie es an einem Patienten verwenden. Üben Sie die Anwendung immer an einer Krankenschwester, einem Arzt oder einem geeigneten Freiwilligen, bevor Sie es klinisch einsetzen.

Anbringen von PUPS und KIDS pädiatrischen Halteschlaufen am Operationstisch

1. Setzen Sie die PUPS und KIDS Pädiatrische Lithotomie Halteschlaufen in die Schure Sockets (separat erhältlich) ein und drehen Sie die Griffe der Schure Sockets im Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen.
2. Legen Sie die Beine des Patienten in die Schuhe und befestigen Sie diese mit den Klettverschlussriemen.



PUPS und KIDS Pädiatrische Lithotomie Halteschlaufen einstellen

1. Drehen Sie die Griffe des Schuhblocks gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lockern, und stellen Sie diese nach oben oder unten in die gewünschte Position. Drehen Sie die Griffe des Schuhblocks im Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen.

Abnehmen der PUPS und KIDS Pädiatrischen Lithotomie Halteschlaufen vom Operationstisch

1. Drehen Sie den Griff der Halteschlaufen gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen, und ziehen Sie die Halteschlaufen aus der Fassung.

KOMPONENTENÜBERSICHT

PUPS und KIDS Pädiatrische Lithotomie Halteschlaufen sind ein Zubehör für den OP-Tisch, das die Positionierung der Beine bei gynäkologischen, urologischen oder laparoskopischen Eingriffen erleichtert.

Ersatz-Pads

508-1295 PUPS Schuhpads

508-1296 KIDS Schuhpads

Andere für die Verwendung erforderliche Produkte:

800-0006 Schure Socket, 2 Stück (separat erhältlich)

Siehe Abmessungen der Seitenschiene unten:

US: 0,374" x 1,122" (9,5 mm x 28,5 mm) PN# 800-0006

Denyer: 0,236" x 1,496" (6 mm x 38 mm) PN# 800-0006-DEN

Europa: 0,394" x 0,984" (10 mm x 25 mm) PN# 800-0006-EU

Eschmann (UK): 0,236" x 1,260" (6 mm x 32 mm) PN# 800-0006-UK

Japan: 0,354" x 1,260" (9 mm x 32 mm) PN# 800-0006-JPN

Schweiz: 0,394" x 1,118" (10 mm x 30 mm) PN# 800-0006-SWISS

ENTSORGUNG

- **Allgemein** - Verhindern Sie Infektionen durch Reinigung und Desinfektion des Produkts vor der Entsorgung
- **Verpackung** - Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial über den Hausmüll gemäß den nationalen Vorschriften
- SchureMed nimmt gebrauchte oder ausgemusterte Produkte zurück - oder entsorgt das Produkt gemäß den nationalen Anforderungen



WARNHINWEISE ZUR PRODUKTVERWENDUNG

WARNUNG!

Die maximale Belastung sollte den angemessenen Anteil eines Patienten mit einem Gewicht von 350 Pfund nicht überschreiten (159 kg). Achten Sie bei OP-Tischen mit niedriger maximaler Tragfähigkeit darauf, dass die Zubehörschienen nicht überlastet werden.



WARNUNG!

Gefahren bei falscher Anwendung. Halten Sie sich strikt an die Gebrauchsanweisung für Ihr Operationstischsystem.



WARNUNG! Verwenden Sie das Gerät nicht wieder, wenn es offensichtliche Anzeichen von Schäden oder Funktionsstörungen aufweist. Wenden Sie sich vor der Wiederverwendung an den Hersteller.

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

Befolgen Sie die aktuellen Richtlinien der Association of periOperative Registered Nurses Journal für ordnungsgemäße Reinigungs- und Desinfektionsverfahren.



WARNUNG!

Halten Sie die Standards für durch Blut übertragbare Krankheitserreger der Occupational Safety and Health Administration ein. Verwenden Sie zur Reinigung des Zubehörs die empfohlene Schutzkleidung, Handschuhe, Masken und Augenschutz.

VORSICHT

Lesen und befolgen Sie unbedingt die Anweisungen des Herstellers für Reinigungsflüssigkeiten. Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel, die Phenole enthalten.

1. Entfernen Sie größere Verunreinigungen aus dem Zubehör mit Einwegmaterialien. Befolgen Sie die entsprechenden Verfahren zur Entsorgung von Bioabfall.
2. Tragen Sie die Reinigungsflüssigkeit großzügig auf das gesamte Zubehör auf und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch ab, bis alle Feuchtigkeit und Reinigungsflüssigkeit vom Zubehör

entfernt ist

3. Zubehör trocknen lassen

BENUTZERHINWEIS

Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

eIFU Sprachversionen

Um die Gebrauchsanweisung herunterzuladen und auszudrucken, gehen Sie bitte zu www.schuremed.com

Symbol-Glossar

Symbol	Titel
	Hersteller
	Herstellungsdatum
	Bevollmächtigter Vertreter in der EU
	Bevollmächtigter Vertreter in der Schweiz
	Importeur
	Seriennummer
	Warnhinweis
	Medizinprodukt
	Unique Device Identifier
	CE-Kennzeichnung



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Gebührenfrei (888) 724-8763 | **Ph** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

