

## Istruzioni per l'uso

**REF** Staffe litotomiche pediatriche - PUPS  
800-0233

**REF** Staffe litotomiche pediatriche - KIDS  
800-0234

*Cuscinetti di ricambio*

Cuscinetti per calzari  
PUPS 508-1296

Cuscinetti per calzari  
KIDS 508-1295



### USO PREVISTO

Le staffe sono pensate per tenere le gambe del paziente durante interventi ginecologici, urologici e laparoscopici di breve o lunga durata. Gli utilizzatori destinatari di questo dispositivo sono i professionisti del settore medico all'interno di ospedali e centri chirurgici.

### INFORMAZIONI GENERALI

- Prodotto non realizzato in lattice di gomma naturale
- Il dispositivo supporta un carico proporzionale di 159 kg (paziente alto 193 cm secondo il modello del corpo umano al 99%)
- La garanzia del prodotto copre i difetti di fabbricazione per un periodo di due anni
- Se il prodotto è stato danneggiato durante la spedizione, chiamare il Servizio clienti al numero (888) 724-8763 o (781) 982-7000 per ottenere il codice di autorizzazione al reso. In caso di problemi con la garanzia del prodotto, contattare il Servizio clienti.
- Dispositivo medico con marchio CE conforme all'RDM (UE) 2017/745
- Il prodotto non richiede manutenzione, verificarne le condizioni prima di un nuovo utilizzo
- In condizioni di utilizzo normale, la durata del dispositivo è di cinque anni
- Conservare il dispositivo tra -20 e 30 °C

### SPECIFICHE GENERALI

*Dimensioni del dispositivo (massime)*

- Lunghezza: 75 +/- 1 cm
- Larghezza: 26 +/- 1 cm
- Profondità/Altezza: 53,3 +/- 1 cm (con cuscinetto)
- Peso del dispositivo per staffa:  
800-0233: 2,3 +/- 0,22 kg (5,1 +/- 0,5 libbre)

800-0234: 2,4 +/- 0,22 kg (5,35 +/- 0,5 libbre)

- Si aggancia in qualsiasi punto della guida del tavolo operatorio
- Per il montaggio basta una sola persona

## ISTRUZIONI

Prima di utilizzarlo nelle operazioni, acquisire familiarità con le caratteristiche del dispositivo di posizionamento del paziente. Fare sempre pratica con infermieri, medici o volontari prima dell'uso clinico.

### Fissaggio delle staffe litotomiche pediatriche PUPS e KIDS al tavolo operatorio

1. Inserire i montanti delle staffe litotomiche pediatriche PUPS e KIDS negli attacchi Schure (venduti separatamente) e ruotare le impugnature dei calzari Schure in senso orario per serrare.
2. Infilare le gambe del paziente nei calzari e fissarle con le chiusure a strappo.



### Regolazione delle staffe litotomiche pediatriche PUPS e KIDS

1. Ruotare le impugnature del blocco dei calzari in senso antiorario per allentarli e regolarli in alto o in basso fino a ottenere la posizione desiderata. Ruotare le impugnature del blocco dei calzari in senso orario per serrare.

### Rimozione delle staffe litotomiche pediatriche PUPS e KIDS dal tavolo operatorio

1. Ruotare le impugnature dell'attacco Schure in senso antiorario per allentarlo ed estrarre le staffe dagli attacchi.

## PANORAMICA DEI COMPONENTI

Le staffe litotomiche pediatriche PUPS e KIDS sono accessori per tavoli operatori che aiutano a posizionare le gambe per interventi ginecologici, urologici e laparoscopici.

### Cuscinetti di ricambio

**508-1295** Cuscinetti per calzari PUPS

**508-1296** Cuscinetti per calzari KIDS

Altri prodotti necessari:

**Attacco Schure 800-0006, 2 ognuno**(venduti separatamente)

Di seguito sono indicate le dimensioni della guida laterale:

**USA:** 9,5 x 28,5 mm PN# 800-0006

**Denyer:** 6 x 38 mm PN# 800-0006-DEN

**Europa:** 10 x 25 mm PN# 800-0006-EU

**Eschmann (Regno Unito):** 6 x 32 mm PN# 800-0006-UK

**Giappone:** 9 x 32 mm PN# 800-0006-JPN

**Svizzera:** 10 x 30 mm PN# 800-0006-SWISS

## SMALTIMENTO

- **Note generali** - Prevenire le infezioni pulendo e disinfettando il prodotto prima di smaltirlo
- **Imballaggio** - Smaltire il materiale di imballaggio insieme ai rifiuti domestici in conformità alle norme nazionali
- SchureMed recupera i prodotti usati o ritirati e li smaltisce in conformità alle norme nazionali



## AVVERTENZE SULL'USO DEL PRODOTTO ATTENZIONE!

*Il carico massimo non deve superare la proporzione relativa a un paziente di 159 kg. In caso di tavoli operatori a bassa capacità di carico massimo, prestare attenzione a non sovraccaricare le guide per accessori.*



### ATTENZIONE!

*Pericolo derivante da un utilizzo errato. Seguire scrupolosamente le istruzioni per l'uso del sistema del proprio tavolo operatorio.*



**ATTENZIONE!** *Non riutilizzare il dispositivo in caso di danni evidenti o problemi di funzionamento. Prima del riutilizzo, consultare il produttore.*

## RACCOMANDAZIONI PER LA PULIZIA

*Seguire le attuali linee guida dell'Association of periOperative Registered Nurses Journal per una corretta procedura di pulizia e disinfezione.*



### ATTENZIONE!

*Rispettare le norme per gli agenti patogeni a trasmissione ematica dell'Occupational Safety and Health Administration. Per la pulizia degli accessori, utilizzare indumenti, guanti, maschere e occhiali protettivi raccomandati.*

## AVVISO

**Leggere e seguire scrupolosamente le indicazioni del produttore per i liquidi detergenti. NON utilizzare detergenti contenenti fenoli.**

1. Rimuovere i principali contaminanti dall'accessorio con materiali monouso. Seguire le procedure appropriate per lo smaltimento dei rifiuti a rischio biologico.
2. Applicare abbondantemente il liquido detergente su tutto l'accessorio e strofinare con un panno pulito e privo di lanugine fino a rimuovere tutta l'umidità e il detergente dall'accessorio
3. Lasciare asciugare l'accessorio

## **PREAVVISO ALL'UTILIZZATORE**

*Eventuali incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.*

### **Versioni linguistiche delle istruzioni elettroniche per l'uso**

Per scaricare e stampare le istruzioni per l'uso, visitare [www.schuremed.com](http://www.schuremed.com)

### **Glossario dei simboli**

| <b>Simbolo</b>                                                                     | <b>Nome</b>                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|   | Produttore                                        |
|   | Data di produzione                                |
|   | Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea |
|   | Rappresentante autorizzato in Svizzera            |
|   | Importatore                                       |
|   | Numero di serie                                   |
|   | Avvertenza                                        |
|   | Dispositivo medico                                |
|   | Identificativo univoco del dispositivo            |
|  | Marcatura CE                                      |



**SchureMed** (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

**Numero verde** (888) 724-8763 | **Tel.** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | [orders@schuremed.com](mailto:orders@schuremed.com)

