

Istruzioni per l'uso

- REF** Deluxe Rail Clamp 800-0248
- REF** Deluxe Rail Clamp (EU) 800-0248-EU
- REF** Deluxe Rail Clamp (UK) 800-0248-UK
- REF** Deluxe Rail Clamp (DEN) 800-0248-DEN
- REF** Deluxe Rail Clamp (JPN) 800-0248-JPN
- REF** Deluxe Rail Clamp (SWISS) 800-0248-SWISS

USO PREVISTO

L'uso previsto è quello di sostenere gli accessori chirurgici sul tavolo operatorio. Gli utenti previsti di questo dispositivo sono i professionisti del settore medico in ospedali e centri chirurgici.

ISTRUZIONI

Acquisire familiarità con le caratteristiche del dispositivo di posizionamento del paziente prima di utilizzarlo con un paziente. Fare sempre pratica con un infermiere, un medico o un volontario appropriato prima dell'uso clinico.

Il Morsetto Deluxe per binario si collega a qualsiasi punto del binario laterale del tavolo. È adatto sia per i pali di montaggio rotondo con diametro 5/8" (1,6 cm) sia per i pali per montaggio con barra piatta 1" x 3/8" (2,5 cm x 0,95 cm). Sostiene gli accessori in posizione verticale o orizzontale.



Attacco al binario laterale

1. Attacco del morsetto al binario
2. Posizionare il palo di montaggio nella cavità per il montaggio
3. Ruotare la maniglia del morsetto in senso orario per fissare il bloccaggio

Scollegamento dal binario laterale

1. Ruotare la maniglia del morsetto in senso antiorario per sbloccare e rimuovere dal binario

SPECIFICHE GENERALI

Dimensioni del dispositivo (massime)

- Lunghezza: 3" +/- 0,5" (8 cm +/- 1 cm) (maniglia chiusa)
- Larghezza: 2" +/- 0,5" (5 cm +/- 1 cm) (maniglia estesa)
- Spessore: 4" +/- 0,5" (10 cm +/- 1 cm) (con maniglia del binario)
- Peso del dispositivo: 1 +/- 0,5 libbre (0,45 kg +/- 0,22 kg)
- Si collega al binario del tavolo operatorio in qualsiasi punto
- Installabile da una sola persona
- Sostiene accessori con palo di montaggio piatto fino a 1 x 3/8" (2,5 cm x 0,95 cm) e pali di montaggio rotondo fino a 5/8" (1,6 cm)

PANORAMICA DEI COMPONENTI

Il Morsetto Deluxe per binario è un morsetto per tavolo operatorio adatto ai binari laterali dei tavolo operatori. Serve a sostenere gli accessori chirurgici sul tavolo operatorio.

Vedere le dimensioni dei binari laterali di seguito:

USA: 0,374" x 1,122" (9,5 mm x 28,5 mm) PN# 800-0248

Denyer: 0,236" x 1,496" (6 mm x 38 mm) PN# 800-0248-DEN

Europa: 0,394" x 0,984" (10 mm x 25 mm) PN# 800-0248-EU

Eschmann (UK): 0,236" x 1,260" (6 mm x 32 mm) PN# 800-0248-UK

Giappone: 0,354" x 1,260" (9 mm x 32 mm) PN# 800-0248-JPN

Svizzera: 0,394" x 1,181" (10 mm x 30 mm) PN# 800-0248-SWISS

INFORMAZIONI GENERALI

- Prodotto non realizzato con lattice di gomma naturale
- Il dispositivo supporta 227 kg (500 libbre) di carico proporzionale del paziente (paziente alto 193 cm (6'4") per modello di corpo umano al 99%)
- La garanzia del prodotto copre il prodotto dai difetti di fabbricazione per un periodo di 2 anni
- Se danneggiato durante la spedizione, chiamare il Servizio Clienti al (888) 724-8763 o +1 (781) 982-7000 per ottenere il numero di autorizzazione al reso del materiale. Per problemi inerenti la garanzia del prodotto, contattare il Servizio Clienti.
- Dispositivo medico con marchio CE conforme a MDR (UE) 2017/745
- Il prodotto non richiede manutenzione; controllare le condizioni del prodotto prima del successivo utilizzo
- La vita utile del dispositivo è di 5 anni in condizioni di uso normale
- Conservare il dispositivo a una temperatura da -4°F a +86°F (da -20 °C a 30 °C)

DISPOSIZIONE

- **Generale:** prevenire l'infezione pulendo e disinfettando il prodotto prima dello smaltimento
- **Imballaggio:** smaltire il materiale di imballaggio tra i rifiuti domestici in base ai requisiti nazionali
- SchureMed accetta indietro i prodotti usati o ritirati o smaltisce il prodotto in conformità con i requisiti nazionali



AVVERTENZE PER L'UTILIZZO DEL PRODOTTO

AVVERTIMENTO! Il carico massimo non deve superare la proporzione adeguata di un paziente che pesa 500 libbre. (227 chilogrammi). Nel caso dei tavoli chirurgici con capacità di carico massima ridotta, fare attenzione a non sovraccaricare le guide accessorie.



AVVERTIMENTO!

I pericoli derivano da un uso non corretto. Seguire scrupolosamente le istruzioni per l'uso con il sistema del tavolo operatorio.



AVVERTIMENTO! Non riutilizzare il dispositivo se sono presenti evidenti segni di danni o problemi funzionali. Consultare il produttore prima di riutilizzarlo.

CONSIGLI PER LA PULIZIA

Seguire le attuali linee guida del giornale dell'Association of PeriOperative Registered Nurses per le corrette procedure di pulizia e disinfezione.



AVVERTIMENTO!

Aderire agli standard per gli agenti patogeni trasmessi per via ematica stabiliti dall'Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro. Utilizzare indumenti protettivi, guanti, maschere e protezioni per gli occhi consigliati per pulire l'accessorio.



ATTENZIONE

Leggere/seguire rigorosamente le indicazioni del produttore per quanto riguarda i liquidi detergenti. NON utilizzare detergenti contenenti fenolici.

1. Rimuovere i principali contaminanti dall'accessorio con materiali usa e getta. Seguire le procedure appropriate per lo smaltimento dei rifiuti a rischio biologico.
2. Applicare abbondantemente il liquido detergente sull'intero accessorio e pulire con un panno pulito e privo di lanugine finché tutta l'umidità e il liquido detergente non vengono rimossi dall'accessorio
3. Lasciare asciugare l'accessorio

AVVISO PER L'UTENTE

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utente e/o il paziente.

Versioni linguistiche dell'eIFU

Per scaricare e stampare le istruzioni per l'uso, visitare il sito www.schuremed.com

Glossario dei simboli

Simbolo	Titolo
	Produttore
	Data di produzione
	Rappresentante Autorizzato nella Comunità Europea
	Rappresentante autorizzato in Svizzera
	Importatore
	Codice lotto
	Numero di serie
	Avvertimento
	Dispositivo medico
	Identificatore univoco del dispositivo
	Marcatura CE



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 Stati Uniti

Numero verde gratuito (888) 724-8763 | Tel (781) 982-7000 | Fax (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

