

사용 설명서

REF Premium Head & Chin Straps 800-0369

용도

수술하는 동안 환자의 머리를 고정하는 데 사용됩니다. 기기 사용자는 병원 및 수술 센터 내 의료 전문가입니다.

지침

환자에게 기기를 사용하기 전에 환자의 특징을 잘 알아두십시오. 임상적으로 사용하기 전에 항상 간호사, 의사 또는 적절한 자원봉사자에게 사용 방법을 연습하십시오.

1. 환자가 수술대/술터 체어에 반듯이 눕게 합니다.
2. 환자에게 기기를 끼운 후 환자의 머리/목을 고정하고 술터 체어를 위로 올려 환자가 파울러(앉은) 자세가 되도록 합니다.
3. 볼 조인트를 느슨하게 합니다. 환자의 귀가 덮이지 않도록 하면서 환자 머리에 맞추어 두부 고정 장치를 조정합니다. 볼 조인트를 조입니다.
4. 두부 고정 장치 덮개가 환자의 머리 옆에 오게 하여 그림과 같이 이마 위에 이마 스트랩을 놓습니다. 단단히 고정하고 환자의 눈썹을 덮지 않도록 합니다.
5. 턱 스트랩이 턱 중앙에 오게 하여 스트랩을 두부 고정 장치의 한쪽 면에 고정합니다. 머리 위치가 적절한지 확인하고 스트랩의 다른 쪽 끝을 두부 고정 장치의 반대 면에 고정합니다.



주의 사항: 머리가 단단히 고정되어 있어야 합니다. 그렇지 않으면 스트랩을 조금 더 조입니다.

구성 요소 개요

Premium Head and Chin Straps는 수술하는 동안 환자의 머리를 단단히 고정시켜 줍니다.

일반 사양

기기 치수(최대)

- 길이: 21" +/- 0.5" (53cm +/- 1cm) (Head)
- 길이: 22" +/- 0.5" (56cm +/- 1cm) (Chin)
- 폭: 2" +/- 0.5" (5cm +/- 1cm) (Head와 Chin 모두)
- 기기 무게: .066lbs. +/- .02lbs. (.03kg +/- .009kg)
- SchureMed 술터 체어의 머리 부분에 부착
- 1 인용 장치

일반 정보

- 제품 소재는 천연고무 라텍스가 아닙니다.

- 배송 중 기기가 손상된 경우 (888) 724-8763 또는 (781) 982-7000으로 고객 서비스에 전화하여 반품 승인 번호를 받으십시오. 제품 보증 관련 문제는 고객 서비스로 문의하십시오.
- MDR (EU) 2017/745에 따라 CE 마크 요건을 충족한 의료 기기입니다.
- 기기를 -20°C~30°C (-4°F~+86°F) 에서 보관하십시오.



1인 환자용—매번 사용한 후 폐기하십시오.

사용자 참고 사항

기기와 관련해 발생한 모든 심각한 사건은 제조업체 및 사용자/환자가 속한 회원국의 해당 당국에 보고해야 합니다.

eIFU 언어 버전

사용 지침을 다운로드하고 인쇄하려면 www.schuremed.com 을 방문하십시오.

기호 용어집

기호	이름
	제조업체
	제조 일자
	유럽 공동체 공인 대리점
	스위스의 공식 대리인
	카탈로그 또는 제품 번호
	수입자
	일련번호
	주의
	의료 기기
	고유 기기 식별자
	CE 인증
	1인 환자용



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

수신자 부담 (888) 724-8763 | 휴대폰 (781) 982-7000 | 팩스 (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

