

Instrukcje użytkowania

REF Premium Head & Chin Straps 800-0369

PRZEZNACZENIE

Produkt jest przeznaczony do podtrzymywania głowy pacjenta podczas zabiegu operacyjnego. Zamierzonymi użytkownikami tego urządzenia są pracownicy medyczni w szpitalach i ośrodkach chirurgicznych.

INSTRUKCJE

Należy zapoznać się z funkcjami wyrobu przeznaczonych do pozycjonowania pacjenta przed jego użyciem z pacjentem. Należy zawsze przećwiczyć stosowanie u pielęgniarki, lekarza lub odpowiedniego ochotnika przed zastosowaniem klinicznym.



1. Położyć pacjenta na stole chirurgicznym / fotelu zabiegowym w pozycji leżącej
2. Po zaintubowaniu pacjenta, przytrzymać głowę/szyję pacjenta i podnieść fotel zabiegowy tak, aby pacjent był w pozycji Fowlera (siedzącej)
3. Poluzować przegub kulowy – wyregulować pozycjoner głowy wokół głowy pacjenta, upewniając się, że uszy pacjenta są odsłonięte – dokręcić przegub kulowy
4. Trzymając klapki pozycjonera głowy wzdłuż głowy pacjenta, umieścić pasek czołowy na czole, jak pokazano. Solidnie zamocować, unikając zakrywania brwi pacjenta.
5. Wyśrodkować pasek na podbródek na podbródku, przymocować pasek z jednej strony pozycjonera głowy. Upewniając się, że głowa jest ustawiona w prawidłowej pozycji, zamocować drugi koniec paska do przeciwnej strony pozycjonera głowy.



UWAGA: Głowa powinna być umieszczona w bezpiecznej pozycji. Jeśli tak nie jest, należy nieco docisnąć paski.

OPIS KOMPONENTU

Produkt Premium Head and Chin Straps bezpiecznie przytrzymuje głowę pacjenta podczas zabiegu operacyjnego.

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Wymiary wyrobu (maksymalne)

- Długość: 21" +/- 0,5" (53 cm +/- 1 cm) (głowa)
- Długość: 22" +/- 0,5" (56 cm +/- 1 cm) (podbródek)
- Szerokość: 2" +/- 0,5 (5 cm +/- 1 cm) (głowa i podbródek)
- Ciężar wyrobu: .066 lbs. +/- .02 lbs. (0,03 kg +/- 0,009 kg)
- Zaczepty do sekcji przeznaczonej na głowę foteli zabiegowych SchureMed Shoulder Chairs
- Instalacja pojedynczej osoby

INFORMACJE OGÓLNE

- Produkt nie jest wykonany z lateksu z kauczuku naturalnego

- W przypadku uszkodzenia podczas transportu należy skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem (888) 724-8763 lub (781) 982-7000, aby uzyskać numer autoryzacji zwrotu produktu.
W przypadku jakichkolwiek zagadnień dotyczących gwarancji na produkt należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych (UE) 2017/745
- Wyrób powinien być przechowywany w temperaturze od -4°F do +86°F (-20°C do 30°C)



DO UŻYTKU PRZEZ JEDNEGO PACJENTA – Wyrzucić po każdym użyciu

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Każdy poważny incydent, który miał miejsce w związku z wyrobem, należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego siedziby lub miejsca zamieszkania użytkownika i/lub pacjenta.

Wersje językowe instrukcji użytkowania w postaci elektronicznej

Aby pobrać i wydrukować instrukcję obsługi, przejdź na stronę www.schuremed.com

Glosariusz symboli

Symbol	Tytuł
	Producent
	Data produkcji
	Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej
	Autoryzowany przedstawiciel w Szwajcarii
	Importer
	Numer katalogowy lub produktu
	Numer seryjny
	Uwaga
	Wyrób medyczny
	Unikalny identyfikator wyrobu
	Oznakowanie CE
	Do użyciu przez jednego pacjenta



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Bezpłatny numer telefonu (888) 724-8763 | **Tel.** (781) 982-7000 | **Faks** (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

