

Istruzioni per l'uso

REF	Morsetto per staffa	800-0396
REF	Morsetto per staffe (EU)	800-0396-EU
REF	Morsetto per staffe (UK)	800-0396-UK
REF	Morsetto per staffe (JPN)	800-0396-JPN
REF	Morsetto per staffe (SWISS)	800-0396-SWISS
REF	Morsetto per staffe (DEN)	800-0396-DEN



USO PREVISTO

L'uso previsto è quello di sostenere gli accessori della sala operatoria sul tavolo operatorio. Il morsetto viene utilizzato principalmente insieme alle nostre staffe Great White. Gli utenti previsti di questo dispositivo sono professionisti medici all'interno di ospedali e centri chirurgici.

ISTRUZIONI

Acquisire familiarità con le caratteristiche del dispositivo di posizionamento del paziente prima dell'uso con un paziente. Praticare sempre l'uso su un infermiere, un medico o un volontario appropriato prima dell'uso clinico.

Il morsetto per staffa si attacca ovunque lungo la guida laterale del tavolo operatorio. Accetta pali di montaggio per barre piatte da 1" x 1/4" (2,5 cm x 0,64 cm). Mantiene tutti gli accessori in posizione verticale.



Fissaggio alla guida laterale

1. Platzieren Sie die Klemme so auf der Schiene, dass sich die flache Unterseite in der unteren Position befindet und der SchureMed-Logoaufkleber nach oben zeigt
2. Spingere il morsetto verso il basso sulla guida finché non si attacca alla guida.
3. Fissare il morsetto ruotando la maniglia in senso orario in posizione di blocco

Stacco dalla sponda laterale

1. *Sbloccare il morsetto ruotando la maniglia in senso antiorario e rimuovere l'accessorio*
2. *Far scorrere il morsetto lontano dai distanziatori, quindi spingere la parte superiore del morsetto verso il basso con il pollice finché non si stacca dalla guida, quindi afferrare la maniglia e sollevare il morsetto dalla guida laterale*

SPECIFICHE GENERALI

Dimensioni del dispositivo (massime)

- *Lunghezza: 7 cm +/- 1 cm (2,75" +/- 0,5")*
- *Altezza : 4,9 cm +/- 1 cm (1,94" +/- 0,5")*
- *Profondità: 6,8 cm +/- 1 cm (2,98" +/- 0,5")*
- *Peso del dispositivo: 0,22 kg +/- 0,22 kg (0,5 +/- 0,5 libbre.)*
- *Si attacca al tavolo operatorio ovunque sulla guida*
- *Installazione da parte di una sola persona*

PANORAMICA DEI COMPONENTI

Staffa Morsetto è un morsetto per tavolo chirurgico che si attacca alle guide laterali del tavolo chirurgico. Il morsetto viene utilizzato principalmente in combinazione con le nostre staffe Great White.

Vedere le dimensioni della sponda laterale di seguito:

Stati Uniti : 0,374" x 1,122" (9,5 mm x 28,5 mm) PN# 800-0396

Europa : 0,394" x 0,984" (10 mm x 25 mm) PN# 800-0396-EU

INFORMAZIONI GENERALI

- *Prodotto non realizzato con lattice di gomma naturale*
- *Il dispositivo supporta un carico proporzionale del paziente di 1.000 libbre (454 kg) (paziente alto 6'4" (193 cm) per modello del corpo umano al 99%)*
- *La garanzia del prodotto copre il prodotto da difetti di fabbricazione per un periodo di 2 anni*
- *Se danneggiato durante la spedizione, chiamare il servizio clienti al numero (888) 724-8763 o (781) 982-7000 per ottenere il numero di autorizzazione alla restituzione del materiale. Per problemi di garanzia del prodotto, contattare il Servizio Clienti.*
- *Il prodotto è esente da manutenzione, controllare le condizioni del prodotto prima del prossimo utilizzo*
- *La durata del dispositivo è di 5 anni in condizioni di utilizzo normale*
- *Conservare il dispositivo tra -4°F e +86°F (-20°C e 30°C)*

DISPOSIZIONE

- **Generale** - *Prevenire l'infezione pulendo e disinfettando il prodotto prima dello smaltimento*
- **Imballaggio** - *Smaltire il materiale di imballaggio insieme ai rifiuti domestici secondo i requisiti nazionali*
- *SchureMed accetta i prodotti usati o ritirati o smaltisce il prodotto in conformità con i requisiti nazionali*



Avvertenze sull'uso del prodotto

AVVERTENZA!

Il carico massimo non deve superare la proporzione appropriata di un paziente del peso di 1.000 libbre.

(454kg). Prestare attenzione con i tavoli chirurgici a bassa capacità di carico che le guide accessorie non siano sovraccaricate.

Raccomandazione per la pulizia

Seguire le attuali linee guida del giornale Association of periOperative Registered Nurses (AORN) per le corrette procedure di pulizia e disinfezione.

ATTENZIONE

Leggere/seguire scrupolosamente le istruzioni del produttore per i fluidi di pulizia. NON utilizzare detergenti contenenti fenoli.

- 1. Rimuovere i principali contaminanti dall'accessorio con materiali usa e getta. Seguire le procedure appropriate per lo smaltimento dei rifiuti a rischio biologico.*
- 2. Applicare abbondantemente il liquido detergente sull'intero accessorio e strofinare con un panno pulito e privo di lanugine fino a quando tutta l'umidità e il liquido detergente non vengono rimossi dall'accessorio*
- 3. Lascia asciugare l'accessorio*

AVVISO PER L'UTENTE

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utente e/o il paziente.

eIFU Versioni linguistiche

Per scaricare e stampare le istruzioni per l'uso, visitare <https://www.schuremed.com>, selezionare il prodotto e fare clic sul menu a discesa per le traduzioni attualmente disponibili per le IFU.

Glossario dei simboli

Simbolo	Nome
	Produttore
	Data di produzione
	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
	Rappresentante autorizzato in Svizzera
	Importatore
	Numero di catalogo
	Numero di serie
	Avvertenza
	Dispositivo medico
	Identificativo univoco del dispositivo
	Marcatura CE



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Numero verde (888) 724- 8763 | **Tel** (781) 982-7000 | **Telefax** (781) 982-7001 |

orders@schuremed.com

