

Istruzioni per l'uso

REF Posizionatori laterali 800-0043

REF Supporti laterali 800-0042

Imbottitura di ricambio

Imbottitura posizionatore laterale 508-0156

Imbottitura circolare supporto laterale 508-0115

Imbottitura rettangolare supporto laterale 508-0116

USO PREVISTO

L'uso previsto è quello di fornire un posizionamento sicuro e confortevole per la sostituzione totale dell'anca e per qualsiasi altro intervento che richieda una stabilità laterale totale. Gli utenti previsti di questo dispositivo sono i professionisti del settore medico in ospedali e centri chirurgici.

ISTRUZIONI



Familiarizzare con le caratteristiche del dispositivo di posizionamento prima di utilizzarlo con il paziente. Fare sempre pratica con un infermiere, un medico o un volontario appropriato prima dell'uso clinico.

Installazione e uso di posizionatori e supporti laterali

1. Inserire tre (3) montanti di montaggio nei morsetti e ruotare le impugniture dei morsetti in senso orario per stringere.
2. Inserire due (2) imbottiture sul lato posteriore del paziente e una (1) imbottitura sul lato anteriore del paziente e stringere le impugniture di posizionamento.
3. Con il paziente sul lettino, sbloccare le impugniture di posizionamento, spostarsi nelle posizioni desiderate e serrare per bloccare il tutto.
4. Per posizionare il paziente in posizione laterale, prona, neuro e panca da parco, regolare la presa Schure XL P/N 800-0134 (venduta separatamente).

Staccare i posizionatori o supporti laterali dal tavolo operatorio

1. Ruotare le impugniture di posizionamento in senso antiorario per allentare ciascun supporto laterale.
2. Rimuovere dai morsetti

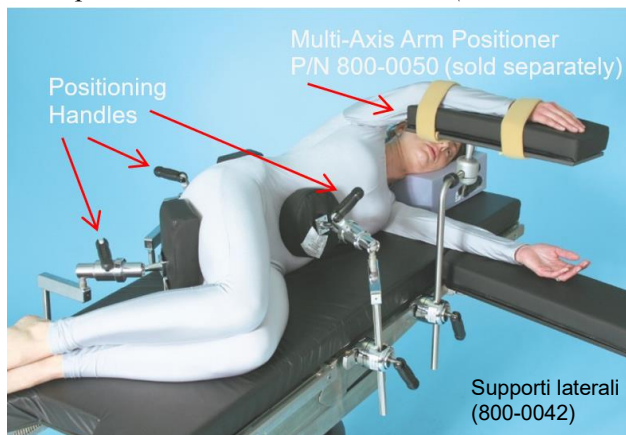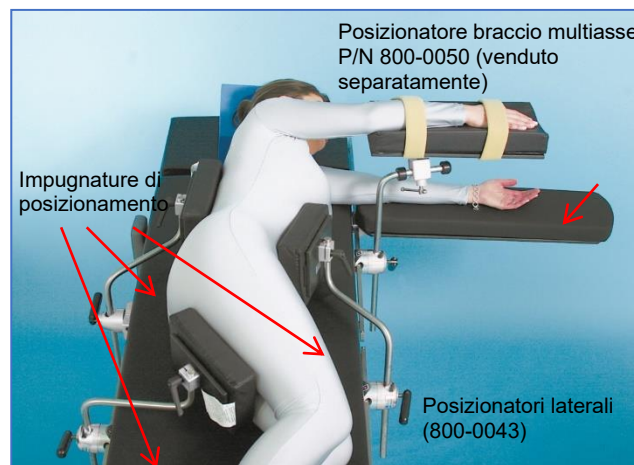

SPECIFICHE GENERALI

Posizionatori laterali (800-0043) Dimensioni (massime):

- *Lunghezza per posizionatore: 33 cm x 1 cm (13.12" +/- 0.5")*
- *Larghezza per posizionatore: 13 cm +/- 1 cm (5.17" +/- 0.5")*
- *Altezza per posizionatore: 52 cm +/- 1 cm (20.59" +/- 0.5")*
- *Peso del dispositivo per posizionatore: 1,36 +/- 0,22 kg (3 +/- 0.5)*
- *Il perno di montaggio con diametro di 5/8" (1,56 cm) si inserisce nella presa di corrente*
- *Installazione per una sola persona*

Supporti laterali (800-0042) Dimensioni (massime):

- *Lunghezza supporto - Rettangolo e cerchio: 37 cm +/- 1 cm (14.5 +/- 0.5")*
- *Larghezza supporto - Rettangolo e cerchio: 24 cm +/- 1 cm (9.56" +/- 0.5")*
- *Altezza supporto - Rettangolo e cerchio: 55 cm x 1 cm (21.75" +/- 0.5)*
- *Peso del dispositivo per supporto: 5,4 +/- 0,22 kg (12 +/- 0.5 lb)*
- *Il perno di montaggio con diametro di 5/8" (1,56 cm) si inserisce nella presa di corrente*
- *Installazione per una sola persona*

PANORAMICA DEI COMPONENTI

I supporti e i posizionatori laterali sono accessori per tavoli chirurgici che garantiscono un posizionamento sicuro e confortevole per la sostituzione totale dell'anca e per qualsiasi altro intervento che richieda una stabilità laterale totale.

Imbottiture di ricambio:

508-0156 Imbottitura posizionatore laterale

508-0115 Imbottitura di ricambio circolare supporto laterale

508-0116 Imbottitura di ricambio rettangolare supporto laterale

Altri prodotti necessari per l'uso: 800-0134 Presa Schure XL (venduto separatamente)

Stati Uniti: 9,5 mm x 28,5 mm (0.374" x 1.122") NP# 800-0134

Denyer: 6 mm x 38 mm (0,236" x 1,496") NP# 800-0134-DEN

Europa: 10 mm x 25 mm (0.394" x 0.984") NP# 800-0134-UE

Eschmann (UK): 6 mm x 32 mm (0,236" x 1,260") NP# 800-0134-UK

Giappone: 9 mm x 32 mm (0.354" x 1.260") NP# 800-0134-JPN

Svizzera: 10 mm x 30 mm (0,394" x 1,181") NP# 800-0134-SWISS

INFORMAZIONI GENERALI

- *Prodotto non realizzato con lattice di gomma naturale*
- *La garanzia del prodotto copre il prodotto dai difetti di fabbricazione per un periodo di 2 anni*
- *Se danneggiato durante la spedizione, chiamare il Servizio Clienti al (888) 724-8763 o (781) 982-7000 per ottenere il numero di autorizzazione al reso del materiale. Per problemi inerenti la garanzia del prodotto, contattare il Servizio Clienti.*
- *Dispositivo medico con marchio CE conforme a MDR (UE) 2017/745*

- *Il prodotto non richiede manutenzione; controllare le condizioni del prodotto prima del successivo utilizzo*
- *La vita utile del dispositivo è di 5 anni in condizioni di uso normale*
- *Conservare il dispositivo tra -20°C e 30°C (tra -4°F e +86°F)*

SMALTIMENTO

- **Norme generali** - *Prevenire le infezioni pulendo e disinfettando il prodotto prima dello smaltimento*
- **Imballaggio** - *Smaltire il materiale di imballaggio tra i rifiuti domestici in conformità con i regolamenti nazionali*
- *SchureMed ritira i prodotti usati o ritirati dal mercato - o smaltisce il prodotto in conformità con i regolamenti nazionali*



AVVERTENZE SULL'USO DEL PRODOTTO

AVVERTENZA!

Pericolo derivante da un uso improprio. Rispettare scrupolosamente le istruzioni per l'uso del sistema del tavolo operatorio.



AVVERTENZA!

Non riutilizzare il dispositivo se ci sono evidenti segni di danni o problemi funzionali. Consultare il produttore prima del riutilizzo.

RACCOMANDAZIONI PER LA PULIZIA

Rispettare le linee guida in vigore dell'Association of perioperative Registered Nurses Journal Guidelines per le corrette procedure di pulizia e disinfezione.



AVVERTENZA!

Conformarsi alle norme per i patogeni trasmissibili per via ematica emesse dalla Occupational Safety and Health Administration. Utilizzare indumenti protettivi, guanti, maschere e protezioni per gli occhi raccomandati quando si pulisce l'accessorio.

ATTENZIONE

Leggere e rispettare scrupolosamente le indicazioni del produttore per i liquidi di pulizia. NON usare detergenti contenenti fenoli.

1. *Rimuovere i principali contaminanti dall'accessorio con materiali monouso. Rispettare le procedure appropriate di smaltimento dei rifiuti a rischio biologico.*
2. *Applicare abbondantemente il liquido di pulizia su tutto l'accessorio e strofinare con un panno pulito e privo di pelucchi, fino a rimuovere tutta l'umidità e il liquido di pulizia dall'accessorio*
3. *Lasciare asciugare l'accessorio*

AVVISO PER L'UTENTE

Ogni incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato Membro in cui l'utente e/o il paziente è stabilito.

Versioni lingue eIFU

Per scaricare e stampare le istruzioni per l'uso, andare su www.schuremed.com

Glossario dei simboli

Simbolo	Nome
	Produttore
	Data di produzione
	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
	Rappresentante autorizzato in Svizzera
	Importatore
	Numero catalogo
	Numero di serie
	Avvertenza
	Dispositivo medico
	Identificativo unico del dispositivo
	Marcatura CE
	Uso per un singolo paziente



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Numero verde (888) 724-8763 | **Tel.** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001

| orders@schuremed.com

