

Istruzioni per l'uso

REF Universal Rail Clamp 800-0085

USO PREVISTO

L'uso previsto è quello di sostenere gli accessori chirurgici sul tavolo operatorio. Gli utenti previsti di questo dispositivo sono i professionisti del settore medico in ospedali e centri chirurgici.



ISTRUZIONI

Acquisire familiarità con le caratteristiche del dispositivo di posizionamento del paziente prima di utilizzarlo con un paziente. Fare sempre pratica con un infermiere, un medico o un volontario appropriato prima dell'uso clinico.

Il Morsetto per binario universale è a molla e si attacca in qualsiasi punto del binario del tavolo operatorio. Si attacca in qualsiasi punto dei binari del tavolo operatorio che abbiano le dimensioni 3/8"W x 1-1/8"H (0,95 cm x 3 cm). Il morsetto è adatto per qualsiasi palo a montaggio rotondo con diametro fino a 5/8" (1,6 cm) e ai pali con montaggio rettangolare fino a 1" x 3/8" (2,5 cm x 0,95 cm).

Attacco al binario laterale

1. Attacco del morsetto al binario
2. Ruotare la maniglia del morsetto in senso orario per fissare la chiusura

Scollegamento dal binario laterale

1. Ruotare la maniglia del morsetto in senso antiorario per scollegare e rimuovere dal binario

SPECIFICHE GENERALI

Dimensioni del dispositivo (massime)

- Lunghezza: 3" +/- 0,5" (8 cm +/- 1 cm) (maniglia chiusa),
5,5" +/- 0,5" (14 cm +/- 1 cm) (maniglia estesa)
- Larghezza: 2" +/- 0,5" (5 cm +/- 1 cm)
- Spessore: 4" +/- 0,5" (10 cm +/- 1 cm)
- Peso del dispositivo: 1 +/- 0,5 libbre (0,45 kg +/- 0,22 kg)
- Si collega al binario del tavolo operatorio in qualsiasi punto
- Installabile da una sola persona
- Sostiene accessori con diametro fino a 5/8" (1,6 cm) e palo di montaggio piatto 1" x 3/8" (2,5 cm x 0,95 cm)

PANORAMICA DEI COMPONENTI

Il morsetto per binario universale è un morsetto per tavolo chirurgico adatto a tutti i binari disponibili negli Stati Uniti. Serve a sostenere gli accessori chirurgici sul tavolo operatorio.

Vedere le dimensioni dei binari laterali di seguito:

USA: 0,374" 1,122" (9,5 mm x 28,5 mm)

INFORMAZIONI GENERALI

- Prodotto non realizzato con lattice di gomma naturale
- Il dispositivo supporta 350 libbre (159 kg) di carico proporzionale del paziente (paziente alto 193 cm (6'4") per modello di corpo umano al 99%)
- La garanzia del prodotto lo copre dai difetti di fabbricazione per un periodo di 2 anni
- Se danneggiato durante la spedizione, chiamare il Servizio Clienti al (888) 724-8763 o +1 (781) 982-7000 per ottenere il numero di autorizzazione al reso del materiale. Per problemi inerenti la garanzia del prodotto, contattare il Servizio Clienti.
- Dispositivo medico con marchio CE conforme a MDR (UE) 2017/745
- Il prodotto non richiede manutenzione; controllare le condizioni del prodotto prima del successivo utilizzo
- La vita utile del dispositivo è di 5 anni in condizioni di uso normale
- Conservare il dispositivo a una temperatura da da -4°F a +86°F (da -20 °C a 30 °C)

DISPOSIZIONE

- Generale: prevenire l'infezione pulendo e disinfettando il prodotto prima dello smaltimento
- Imballaggio: smaltire il materiale di imballaggio tra i rifiuti domestici in base ai requisiti nazionali
- SchureMed accetta indietro i prodotti usati o ritirati o smaltisce il prodotto in conformità con i requisiti nazionali



AVVERTENZE PER L'UTILIZZO DEL PRODOTTO

ATTENZIONE!

Il carico massimo non deve superare la proporzione adeguata di un paziente che pesa 350 libbre. (159 chilogrammi). Nel caso dei tavoli chirurgici con capacità di carico massima ridotta, fare attenzione a non sovraccaricare le guide accessorie.



AVVERTIMENTO! Non riutilizzare il dispositivo se sono presenti evidenti segni di danni o problemi funzionali. Consultare il produttore prima di riutilizzarlo.

CONSIGLI PER LA PULIZIA

Seguire le attuali linee guida del giornale dell'Association of PeriOperative Registered Nurses per le corrette procedure di pulizia e disinfezione.



AVVERTIMENTO!

Aderire agli standard per gli agenti patogeni trasmessi per via ematica dell'Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro. Utilizzare indumenti protettivi, guanti, maschere e protezioni per gli occhi consigliati per pulire l'accessorio.

ATTENZIONE

Leggere/seguire rigorosamente le indicazioni del produttore per quanto riguarda i liquidi detergenti. NON utilizzare detergenti contenenti fenoli.

1. Rimuovere i principali contaminanti dall'accessorio con materiali usa e getta. Seguire le procedure appropriate per lo smaltimento dei rifiuti a rischio biologico.
2. Applicare abbondantemente il liquido detergente sull'intero accessorio e pulire con un panno pulito e privo di lanugine finché tutta l'umidità e il liquido detergente non vengono rimossi dall'accessorio
3. Lasciare asciugare l'accessorio

AVVISO PER L'UTENTE

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utente e/o il paziente.

Versioni lingue eIFU

Per scaricare e stampare le istruzioni per l'uso, visitare il sito www.schuremed.com

Glossario dei simboli

Simbolo	Nome
	Produttore
	Data di produzione
	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
	Rappresentante autorizzato in Svizzera
	Importatore
	Numero di serie
	Avvertenza
	Dispositivo medico
	Identificativo univoco del dispositivo
	Marcatura CE



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Numero verde (888) 724-8763 | Tel. (781) 982-7000 | Fax (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

